

INSTRUÇÃO DE USO

NOME TÉCNICO: CÂNULAS

NOME COMERCIAL: CÂNULA DESBASTE DIAMANT COLUNA

PRODUTO ESTÉRIL – ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO (ETO)

USO ÚNICO – PROIBIDO REPROCESSAR

REGISTRO ANVISA Nº 80777289023

1. ALERTA DE INSTRUÇÃO DE USO

A Setormed disponibiliza as instruções de uso dos produtos no site www.setormed.com.br, sendo indexada pelo número de registro ANVISA, no menu “Instr. de Uso” e visualizada no navegador da web.

Todas as Instruções de Uso possuem o número e data de revisão no rodapé. **Atenção: o número de revisão informada no rótulo do produto deve ser utilizado para consulta correta.**

Para receber Instruções de Uso em formato impresso ou versões anteriores das disponíveis no site, solicitar o documento pelo telefone (16) 3416-5398 ou e-mail sac@setormed.com.br. Não haverá custo adicional, inclusive de envio.

2. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

A embalagem contém uma CÂNULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, acondicionada em:

- **Embalagem Primária:** Bandeja Blister de polietileno tereftalato (PET) com fechamento em Tyvek 1073B com laca;
- **Embalagem Secundária:** Caixa de papel cartão triplex e rotulagem;
- **Embalagem Terciária:** Filme poliolefínico.

3. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

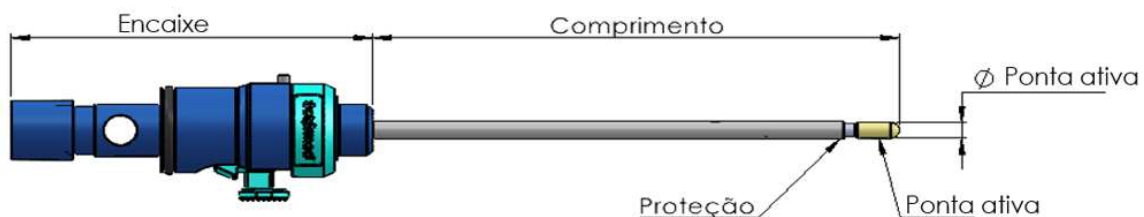


Tabela 1. Composição da CÂNULA DESBASTE DIAMANT COLUNA.

Componente	Composição	Norma	Contato com o paciente?
Ponta Ativa	Aço Inoxidável tipo 455	ASTM F899	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Proteção	Aço Inoxidável tipo 304	ASTM F899	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
Encaixe	Liga de Alumínio, Silicone e Politetrafluoretileno (PTFE)	ABNT NBR ISO 209	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não

4. APRESENTAÇÃO COMERCIAL

Os modelos comerciais da CÂNULA DESBASTE DIAMANT COLUNA são apresentados em diferentes encaixes (05, 06, 07, 09 e 12), diâmetros de ponta ativa ($\varnothing 3,5/ \varnothing 4,0/ \varnothing 4,5$ e $\varnothing 5,0$), comprimentos (95mm, 130mm, 180mm, 250mm, 300mm e 360mm), configurações da ponta ativa (BD (Broca Redonda), BAD (Broca Afilada), BOD (Broca Cônica) e BED (Broca Eliptica)) e apresenta modelos Sem Proteção, com Proteção Lateral e/ou com Proteção Frontal. A Tabela 2 apresenta as especificações de cada modelo comercial.

Tabela 2. Modelos Comerciais da CÂNULA DESBASTE DIAMANT COLUNA.

Código do Produto	Descrição do Produto
227053211	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x95mm BD SP
227053212	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x95mm BD
227053221	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x95mm BAD SP
227053222	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x95mm BAD
227053223	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x95mm BAD PF
227053231	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x95mm BOD SP
227053232	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x95mm BOD
227053241	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x95mm BED SP
227053242	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x95mm BED
227053411	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x130mm BD SP
227053412	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x130mm BD
227053421	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x130mm BAD SP
227053422	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x130mm BAD
227053423	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x130mm BAD PF
227053431	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x130mm BOD SP
227053432	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x130mm BOD
227053441	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x130mm BED SP
227053442	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x130mm BED
227053611	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x180mm BD SP
227053612	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x180mm BD
227053621	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x180mm BAD SP
227053622	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x180mm BAD
227053623	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x180mm BAD PF
227053631	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x180mm BOD SP
227053632	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x180mm BOD
227053641	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x180mm BED SP
227053642	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x180mm BED
227053711	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x250mm BD SP
227053712	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x250mm BD
227053721	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x250mm BAD SP
227053722	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x250mm BAD
227053723	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x250mm BAD PF
227053731	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x250mm BOD SP

Código do Produto	Descrição do Produto
227053732	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x250mm BOD
227053741	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x250mm BED SP
227053742	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x250mm BED
227053811	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x300mm BD SP
227053812	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x300mm BD
227053821	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x300mm BAD SP
227053822	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x300mm BAD
227053823	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x300mm BAD PF
227053831	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x300mm BOD SP
227053832	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x300mm BOD
227053841	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x300mm BED SP
227053842	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x300mm BED
227053911	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x360mm BD SP
227053912	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x360mm BD
227053921	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x360mm BAD SP
227053922	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x360mm BAD
227053923	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x360mm BAD PF
227053931	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x360mm BOD SP
227053932	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x360mm BOD
227053941	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x360mm BED SP
227053942	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø3,5x360mm BED
227054211	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x95mm BD SP
227054212	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x95mm BD
227054221	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x95mm BAD SP
227054222	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x95mm BAD
227054223	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x95mm BAD PF
227054231	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x95mm BOD SP
227054232	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x95mm BOD
227054241	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x95mm BED SP
227054242	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x95mm BED
227054411	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x130mm BD SP
227054412	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x130mm BD
227054421	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x130mm BAD SP
227054422	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x130mm BAD

Código do Produto	Descrição do Produto
227054423	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x130mm BAD PF
227054431	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x130mm BOD SP
227054432	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x130mm BOD
227054441	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x130mm BED SP
227054442	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x130mm BED
227054611	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x180mm BD SP
227054612	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x180mm BD
227054621	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x180mm BAD SP
227054622	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x180mm BAD
227054623	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x180mm BAD PF
227054631	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x180mm BOD SP
227054632	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x180mm BOD
227054641	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x180mm BED SP
227054642	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x180mm BED
227054711	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x250mm BD SP
227054712	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x250mm BD
227054721	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x250mm BAD SP
227054722	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x250mm BAD
227054723	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x250mm BAD PF
227054731	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x250mm BOD SP
227054732	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x250mm BOD
227054741	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x250mm BED SP
227054742	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x250mm BED
227054811	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x300mm BD SP
227054812	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x300mm BD
227054821	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x300mm BAD SP
227054822	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x300mm BAD
227054823	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x300mm BAD PF
227054831	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x300mm BOD SP
227054832	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x300mm BOD
227054841	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x300mm BED SP
227054842	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x300mm BED
227054911	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x360mm BD SP
227054912	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x360mm BD

Código do Produto	Descrição do Produto
227054921	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x360mm BAD SP
227054922	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x360mm BAD
227054923	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x360mm BAD PF
227054931	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x360mm BOD SP
227054932	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x360mm BOD
227054941	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x360mm BED SP
227054942	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,0x360mm BED
227055211	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x95mm BD SP
227055212	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x95mm BD
227055221	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x95mm BAD SP
227055222	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x95mm BAD
227055231	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x95mm BOD SP
227055232	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x95mm BOD
227055241	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x95mm BED SP
227055242	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x95mm BED
227055411	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x130mm BD SP
227055412	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x130mm BD
227055421	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x130mm BAD SP
227055422	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x130mm BAD
227055431	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x130mm BOD SP
227055432	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x130mm BOD
227055441	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x130mm BED SP
227055442	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x130mm BED
227055611	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x180mm BD SP
227055612	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x180mm BD
227055621	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x180mm BAD SP
227055622	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x180mm BAD
227055631	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x180mm BOD SP
227055632	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x180mm BOD
227055641	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x180mm BED SP
227055642	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x180mm BED
227055711	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x250mm BD SP
227055712	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x250mm BD
227055721	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x250mm BAD SP

Código do Produto	Descrição do Produto
227055722	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x250mm BAD
227055731	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x250mm BOD SP
227055732	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x250mm BOD
227055741	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x250mm BED SP
227055742	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x250mm BED
227055811	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x300mm BD SP
227055812	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x300mm BD
227055821	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x300mm BAD SP
227055822	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x300mm BAD
227055831	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x300mm BOD SP
227055832	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x300mm BOD
227055841	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x300mm BED SP
227055842	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x300mm BED
227055911	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x360mm BD SP
227055912	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x360mm BD
227055921	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x360mm BAD SP
227055922	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x360mm BAD
227055931	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x360mm BOD SP
227055932	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x360mm BOD
227055941	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x360mm BED SP
227055942	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø4,5x360mm BED
227056211	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x95mm BD SP
227056212	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x95mm BD
227056221	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x95mm BAD SP
227056222	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x95mm BAD
227056231	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x95mm BOD SP
227056232	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x95mm BOD
227056241	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x95mm BED SP
227056242	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x95mm BED
227056411	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x130mm BD SP
227056412	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x130mm BD
227056421	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x130mm BAD SP
227056422	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x130mm BAD
227056431	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x130mm BOD SP

Código do Produto	Descrição do Produto
227056432	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x130mm BOD
227056441	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x130mm BED SP
227056442	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x130mm BED
227056611	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x180mm BD SP
227056612	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x180mm BD
227056621	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x180mm BAD SP
227056622	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x180mm BAD
227056631	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x180mm BOD SP
227056632	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x180mm BOD
227056641	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x180mm BED SP
227056642	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x180mm BED
227056711	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x250mm BD SP
227056712	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x250mm BD
227056721	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x250mm BAD SP
227056722	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x250mm BAD
227056731	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x250mm BOD SP
227056732	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x250mm BOD
227056741	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x250mm BED SP
227056742	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x250mm BED
227056811	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x300mm BD SP
227056812	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x300mm BD
227056821	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x300mm BAD SP
227056822	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x300mm BAD
227056831	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x300mm BOD SP
227056832	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x300mm BOD
227056841	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x300mm BED SP
227056842	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x300mm BED
227056911	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x360mm BD SP
227056912	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x360mm BD
227056921	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x360mm BAD SP
227056922	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x360mm BAD
227056931	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x360mm BOD SP
227056932	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x360mm BOD
227056941	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x360mm BED SP

Código do Produto	Descrição do Produto
227056942	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC05, Ø5,0x360mm BED
227063211	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x95mm BD SP
227063212	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x95mm BD
227063221	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x95mm BAD SP
227063222	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x95mm BAD
227063223	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x95mm BAD PF
227063231	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x95mm BOD SP
227063232	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x95mm BOD
227063241	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x95mm BED SP
227063242	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x95mm BED
227063411	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x130mm BD SP
227063412	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x130mm BD
227063421	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x130mm BAD SP
227063422	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x130mm BAD
227063423	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x130mm BAD PF
227063431	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x130mm BOD SP
227063432	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x130mm BOD
227063441	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x130mm BED SP
227063442	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x130mm BED
227063611	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x180mm BD SP
227063612	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x180mm BD
227063621	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x180mm BAD SP
227063622	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x180mm BAD
227063623	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x180mm BAD PF
227063631	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x180mm BOD SP
227063632	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x180mm BOD
227063641	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x180mm BED SP
227063642	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x180mm BED
227063711	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x250mm BD SP
227063712	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x250mm BD
227063721	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x250mm BAD SP
227063722	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x250mm BAD
227063723	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x250mm BAD PF
227063731	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x250mm BOD SP

Código do Produto	Descrição do Produto
227063732	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x250mm BOD
227063741	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x250mm BED SP
227063742	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x250mm BED
227063811	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x300mm BD SP
227063812	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x300mm BD
227063821	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x300mm BAD SP
227063822	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x300mm BAD
227063823	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x300mm BAD PF
227063831	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x300mm BOD SP
227063832	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x300mm BOD
227063841	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x300mm BED SP
227063842	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x300mm BED
227063911	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x360mm BD SP
227063912	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x360mm BD
227063921	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x360mm BAD SP
227063922	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x360mm BAD
227063923	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x360mm BAD PF
227063931	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x360mm BOD SP
227063932	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x360mm BOD
227063941	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x360mm BED SP
227063942	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø3,5x360mm BED
227064211	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x95mm BD SP
227064212	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x95mm BD
227064221	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x95mm BAD SP
227064222	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x95mm BAD
227064223	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x95mm BAD PF
227064231	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x95mm BOD SP
227064232	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x95mm BOD
227064241	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x95mm BED SP
227064242	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x95mm BED
227064411	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x130mm BD SP
227064412	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x130mm BD
227064421	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x130mm BAD SP
227064422	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x130mm BAD

Código do Produto	Descrição do Produto
227064423	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x130mm BAD PF
227064431	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x130mm BOD SP
227064432	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x130mm BOD
227064441	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x130mm BED SP
227064442	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x130mm BED
227064611	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x180mm BD SP
227064612	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x180mm BD
227064621	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x180mm BAD SP
227064622	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x180mm BAD
227064623	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x180mm BAD PF
227064631	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x180mm BOD SP
227064632	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x180mm BOD
227064641	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x180mm BED SP
227064642	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x180mm BED
227064711	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x250mm BD SP
227064712	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x250mm BD
227064721	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x250mm BAD SP
227064722	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x250mm BAD
227064723	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x250mm BAD PF
227064731	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x250mm BOD SP
227064732	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x250mm BOD
227064741	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x250mm BED SP
227064742	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x250mm BED
227064811	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x300mm BD SP
227064812	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x300mm BD
227064821	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x300mm BAD SP
227064822	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x300mm BAD
227064823	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x300mm BAD PF
227064831	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x300mm BOD SP
227064832	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x300mm BOD
227064841	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x300mm BED SP
227064842	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x300mm BED
227064911	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x360mm BD SP
227064912	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x360mm BD

Código do Produto	Descrição do Produto
227064921	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x360mm BAD SP
227064922	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x360mm BAD
227064923	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x360mm BAD PF
227064931	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x360mm BOD SP
227064932	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x360mm BOD
227064941	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x360mm BED SP
227064942	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,0x360mm BED
227065211	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x95mm BD SP
227065212	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x95mm BD
227065221	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x95mm BAD SP
227065222	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x95mm BAD
227065231	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x95mm BOD SP
227065232	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x95mm BOD
227065241	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x95mm BED SP
227065242	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x95mm BED
227065411	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x130mm BD SP
227065412	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x130mm BD
227065421	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x130mm BAD SP
227065422	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x130mm BAD
227065431	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x130mm BOD SP
227065432	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x130mm BOD
227065441	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x130mm BED SP
227065442	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x130mm BED
227065611	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x180mm BD SP
227065612	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x180mm BD
227065621	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x180mm BAD SP
227065622	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x180mm BAD
227065631	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x180mm BOD SP
227065632	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x180mm BOD
227065641	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x180mm BED SP
227065642	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x180mm BED
227065711	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x250mm BD SP
227065712	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x250mm BD
227065721	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x250mm BAD SP

Código do Produto	Descrição do Produto
227065722	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x250mm BAD
227065731	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x250mm BOD SP
227065732	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x250mm BOD
227065741	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x250mm BED SP
227065742	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x250mm BED
227065811	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x300mm BD SP
227065812	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x300mm BD
227065821	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x300mm BAD SP
227065822	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x300mm BAD
227065831	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x300mm BOD SP
227065832	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x300mm BOD
227065841	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x300mm BED SP
227065842	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x300mm BED
227065911	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x360mm BD SP
227065912	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x360mm BD
227065921	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x360mm BAD SP
227065922	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x360mm BAD
227065931	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x360mm BOD SP
227065932	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x360mm BOD
227065941	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x360mm BED SP
227065942	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø4,5x360mm BED
227066211	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x95mm BD SP
227066212	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x95mm BD
227066221	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x95mm BAD SP
227066222	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x95mm BAD
227066231	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x95mm BOD SP
227066232	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x95mm BOD
227066241	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x95mm BED SP
227066242	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x95mm BED
227066411	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x130mm BD SP
227066412	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x130mm BD
227066421	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x130mm BAD SP
227066422	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x130mm BAD
227066431	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x130mm BOD SP

Código do Produto	Descrição do Produto
227066432	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x130mm BOD
227066441	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x130mm BED SP
227066442	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x130mm BED
227066611	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x180mm BD SP
227066612	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x180mm BD
227066621	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x180mm BAD SP
227066622	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x180mm BAD
227066631	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x180mm BOD SP
227066632	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x180mm BOD
227066641	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x180mm BED SP
227066642	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x180mm BED
227066711	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x250mm BD SP
227066712	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x250mm BD
227066721	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x250mm BAD SP
227066722	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x250mm BAD
227066731	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x250mm BOD SP
227066732	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x250mm BOD
227066741	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x250mm BED SP
227066742	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x250mm BED
227066811	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x300mm BD SP
227066812	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x300mm BD
227066821	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x300mm BAD SP
227066822	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x300mm BAD
227066831	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x300mm BOD SP
227066832	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x300mm BOD
227066841	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x300mm BED SP
227066842	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x300mm BED
227066911	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x360mm BD SP
227066912	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x360mm BD
227066921	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x360mm BAD SP
227066922	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x360mm BAD
227066931	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x360mm BOD SP
227066932	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x360mm BOD
227066941	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x360mm BED SP

Código do Produto	Descrição do Produto
227066942	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC06, Ø5,0x360mm BED
227073211	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x95mm BD SP
227073212	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x95mm BD
227073221	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x95mm BAD SP
227073222	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x95mm BAD
227073223	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x95mm BAD PF
227073231	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x95mm BOD SP
227073232	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x95mm BOD
227073241	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x95mm BED SP
227073242	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x95mm BED
227073411	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x130mm BD SP
227073412	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x130mm BD
227073421	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x130mm BAD SP
227073422	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x130mm BAD
227073423	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x130mm BAD PF
227073431	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x130mm BOD SP
227073432	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x130mm BOD
227073441	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x130mm BED SP
227073442	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x130mm BED
227073611	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x180mm BD SP
227073612	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x180mm BD
227073621	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x180mm BAD SP
227073622	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x180mm BAD
227073623	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x180mm BAD PF
227073631	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x180mm BOD SP
227073632	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x180mm BOD
227073641	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x180mm BED SP
227073642	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x180mm BED
227073711	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x250mm BD SP
227073712	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x250mm BD
227073721	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x250mm BAD SP
227073722	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x250mm BAD
227073723	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x250mm BAD PF
227073731	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x250mm BOD SP

Código do Produto	Descrição do Produto
227073732	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x250mm BOD
227073741	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x250mm BED SP
227073742	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x250mm BED
227073811	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x300mm BD SP
227073812	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x300mm BD
227073821	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x300mm BAD SP
227073822	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x300mm BAD
227073823	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x300mm BAD PF
227073831	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x300mm BOD SP
227073832	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x300mm BOD
227073841	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x300mm BED SP
227073842	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x300mm BED
227073911	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x360mm BD SP
227073912	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x360mm BD
227073921	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x360mm BAD SP
227073922	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x360mm BAD
227073923	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x360mm BAD PF
227073931	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x360mm BOD SP
227073932	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x360mm BOD
227073941	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x360mm BED SP
227073942	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø3,5x360mm BED
227074211	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x95mm BD SP
227074212	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x95mm BD
227074221	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x95mm BAD SP
227074222	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x95mm BAD
227074223	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x95mm BAD PF
227074231	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x95mm BOD SP
227074232	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x95mm BOD
227074241	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x95mm BED SP
227074242	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x95mm BED
227074411	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x130mm BD SP
227074412	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x130mm BD
227074421	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x130mm BAD SP
227074422	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x130mm BAD

Código do Produto	Descrição do Produto
227074423	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x130mm BAD PF
227074431	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x130mm BOD SP
227074432	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x130mm BOD
227074441	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x130mm BED SP
227074442	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x130mm BED
227074611	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x180mm BD SP
227074612	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x180mm BD
227074621	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x180mm BAD SP
227074622	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x180mm BAD
227074623	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x180mm BAD PF
227074631	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x180mm BOD SP
227074632	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x180mm BOD
227074641	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x180mm BED SP
227074642	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x180mm BED
227074711	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x250mm BD SP
227074712	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x250mm BD
227074721	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x250mm BAD SP
227074722	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x250mm BAD
227074723	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x250mm BAD PF
227074731	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x250mm BOD SP
227074732	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x250mm BOD
227074741	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x250mm BED SP
227074742	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x250mm BED
227074811	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x300mm BD SP
227074812	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x300mm BD
227074821	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x300mm BAD SP
227074822	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x300mm BAD
227074823	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x300mm BAD PF
227074831	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x300mm BOD SP
227074832	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x300mm BOD
227074841	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x300mm BED SP
227074842	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x300mm BED
227074911	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x360mm BD SP
227074912	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x360mm BD

Código do Produto	Descrição do Produto
227074921	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x360mm BAD SP
227074922	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x360mm BAD
227074923	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x360mm BAD PF
227074931	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x360mm BOD SP
227074932	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x360mm BOD
227074941	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x360mm BED SP
227074942	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,0x360mm BED
227075211	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x95mm BD SP
227075212	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x95mm BD
227075221	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x95mm BAD SP
227075222	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x95mm BAD
227075231	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x95mm BOD SP
227075232	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x95mm BOD
227075241	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x95mm BED SP
227075242	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x95mm BED
227075411	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x130mm BD SP
227075412	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x130mm BD
227075421	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x130mm BAD SP
227075422	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x130mm BAD
227075431	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x130mm BOD SP
227075432	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x130mm BOD
227075441	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x130mm BED SP
227075442	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x130mm BED
227075611	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x180mm BD SP
227075612	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x180mm BD
227075621	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x180mm BAD SP
227075622	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x180mm BAD
227075631	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x180mm BOD SP
227075632	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x180mm BOD
227075641	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x180mm BED SP
227075642	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x180mm BED
227075711	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x250mm BD SP
227075712	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x250mm BD
227075721	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x250mm BAD SP

Código do Produto	Descrição do Produto
227075722	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x250mm BAD
227075731	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x250mm BOD SP
227075732	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x250mm BOD
227075741	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x250mm BED SP
227075742	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x250mm BED
227075811	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x300mm BD SP
227075812	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x300mm BD
227075821	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x300mm BAD SP
227075822	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x300mm BAD
227075831	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x300mm BOD SP
227075832	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x300mm BOD
227075841	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x300mm BED SP
227075842	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x300mm BED
227075911	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x360mm BD SP
227075912	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x360mm BD
227075921	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x360mm BAD SP
227075922	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x360mm BAD
227075931	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x360mm BOD SP
227075932	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x360mm BOD
227075941	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x360mm BED SP
227075942	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø4,5x360mm BED
227076211	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x95mm BD SP
227076212	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x95mm BD
227076221	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x95mm BAD SP
227076222	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x95mm BAD
227076231	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x95mm BOD SP
227076232	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x95mm BOD
227076241	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x95mm BED SP
227076242	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x95mm BED
227076411	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x130mm BD SP
227076412	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x130mm BD
227076421	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x130mm BAD SP
227076422	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x130mm BAD
227076431	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x130mm BOD SP

Código do Produto	Descrição do Produto
227076432	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x130mm BOD
227076441	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x130mm BED SP
227076442	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x130mm BED
227076611	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x180mm BD SP
227076612	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x180mm BD
227076621	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x180mm BAD SP
227076622	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x180mm BAD
227076631	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x180mm BOD SP
227076632	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x180mm BOD
227076641	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x180mm BED SP
227076642	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x180mm BED
227076711	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x250mm BD SP
227076712	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x250mm BD
227076721	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x250mm BAD SP
227076722	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x250mm BAD
227076731	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x250mm BOD SP
227076732	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x250mm BOD
227076741	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x250mm BED SP
227076742	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x250mm BED
227076811	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x300mm BD SP
227076812	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x300mm BD
227076821	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x300mm BAD SP
227076822	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x300mm BAD
227076831	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x300mm BOD SP
227076832	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x300mm BOD
227076841	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x300mm BED SP
227076842	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x300mm BED
227076911	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x360mm BD SP
227076912	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x360mm BD
227076921	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x360mm BAD SP
227076922	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x360mm BAD
227076931	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x360mm BOD SP
227076932	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x360mm BOD
227076941	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x360mm BED SP

Código do Produto	Descrição do Produto
227076942	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC07, Ø5,0x360mm BED
227093211	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x95mm BD SP
227093212	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x95mm BD
227093221	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x95mm BAD SP
227093222	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x95mm BAD
227093223	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x95mm BAD PF
227093231	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x95mm BOD SP
227093232	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x95mm BOD
227093241	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x95mm BED SP
227093242	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x95mm BED
227093411	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x130mm BD SP
227093412	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x130mm BD
227093421	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x130mm BAD SP
227093422	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x130mm BAD
227093423	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x130mm BAD PF
227093431	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x130mm BOD SP
227093432	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x130mm BOD
227093441	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x130mm BED SP
227093442	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x130mm BED
227093611	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x180mm BD SP
227093612	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x180mm BD
227093621	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x180mm BAD SP
227093622	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x180mm BAD
227093623	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x180mm BAD PF
227093631	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x180mm BOD SP
227093632	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x180mm BOD
227093641	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x180mm BED SP
227093642	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x180mm BED
227093711	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x250mm BD SP
227093712	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x250mm BD
227093721	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x250mm BAD SP
227093722	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x250mm BAD
227093723	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x250mm BAD PF
227093731	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x250mm BOD SP

Código do Produto	Descrição do Produto
227093732	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x250mm BOD
227093741	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x250mm BED SP
227093742	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x250mm BED
227093811	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x300mm BD SP
227093812	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x300mm BD
227093821	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x300mm BAD SP
227093822	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x300mm BAD
227093823	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x300mm BAD PF
227093831	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x300mm BOD SP
227093832	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x300mm BOD
227093841	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x300mm BED SP
227093842	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x300mm BED
227093911	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x360mm BD SP
227093912	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x360mm BD
227093921	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x360mm BAD SP
227093922	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x360mm BAD
227093923	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x360mm BAD PF
227093931	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x360mm BOD SP
227093932	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x360mm BOD
227093941	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x360mm BED SP
227093942	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø3,5x360mm BED
227094211	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x95mm BD SP
227094212	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x95mm BD
227094221	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x95mm BAD SP
227094222	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x95mm BAD
227094223	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x95mm BAD PF
227094231	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x95mm BOD SP
227094232	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x95mm BOD
227094241	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x95mm BED SP
227094242	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x95mm BED
227094411	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x130mm BD SP
227094412	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x130mm BD
227094421	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x130mm BAD SP
227094422	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x130mm BAD

Código do Produto	Descrição do Produto
227094423	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x130mm BAD PF
227094431	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x130mm BOD SP
227094432	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x130mm BOD
227094441	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x130mm BED SP
227094442	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x130mm BED
227094611	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x180mm BD SP
227094612	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x180mm BD
227094621	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x180mm BAD SP
227094622	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x180mm BAD
227094623	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x180mm BAD PF
227094631	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x180mm BOD SP
227094632	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x180mm BOD
227094641	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x180mm BED SP
227094642	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x180mm BED
227094711	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x250mm BD SP
227094712	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x250mm BD
227094721	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x250mm BAD SP
227094722	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x250mm BAD
227094723	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x250mm BAD PF
227094731	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x250mm BOD SP
227094732	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x250mm BOD
227094741	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x250mm BED SP
227094742	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x250mm BED
227094811	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x300mm BD SP
227094812	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x300mm BD
227094821	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x300mm BAD SP
227094822	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x300mm BAD
227094823	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x300mm BAD PF
227094831	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x300mm BOD SP
227094832	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x300mm BOD
227094841	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x300mm BED SP
227094842	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x300mm BED
227094911	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x360mm BD SP
227094912	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x360mm BD

Código do Produto	Descrição do Produto
227094921	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x360mm BAD SP
227094922	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x360mm BAD
227094923	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x360mm BAD PF
227094931	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x360mm BOD SP
227094932	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x360mm BOD
227094941	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x360mm BED SP
227094942	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,0x360mm BED
227095211	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x95mm BD SP
227095212	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x95mm BD
227095221	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x95mm BAD SP
227095222	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x95mm BAD
227095231	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x95mm BOD SP
227095232	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x95mm BOD
227095241	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x95mm BED SP
227095242	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x95mm BED
227095411	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x130mm BD SP
227095412	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x130mm BD
227095421	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x130mm BAD SP
227095422	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x130mm BAD
227095431	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x130mm BOD SP
227095432	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x130mm BOD
227095441	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x130mm BED SP
227095442	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x130mm BED
227095611	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x180mm BD SP
227095612	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x180mm BD
227095621	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x180mm BAD SP
227095622	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x180mm BAD
227095631	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x180mm BOD SP
227095632	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x180mm BOD
227095641	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x180mm BED SP
227095642	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x180mm BED
227095711	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x250mm BD SP
227095712	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x250mm BD
227095721	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x250mm BAD SP

Código do Produto	Descrição do Produto
227095722	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x250mm BAD
227095731	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x250mm BOD SP
227095732	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x250mm BOD
227095741	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x250mm BED SP
227095742	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x250mm BED
227095811	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x300mm BD SP
227095812	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x300mm BD
227095821	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x300mm BAD SP
227095822	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x300mm BAD
227095831	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x300mm BOD SP
227095832	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x300mm BOD
227095841	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x300mm BED SP
227095842	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x300mm BED
227095911	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x360mm BD SP
227095912	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x360mm BD
227095921	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x360mm BAD SP
227095922	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x360mm BAD
227095931	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x360mm BOD SP
227095932	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x360mm BOD
227095941	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x360mm BED SP
227095942	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø4,5x360mm BED
227096211	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x95mm BD SP
227096212	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x95mm BD
227096221	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x95mm BAD SP
227096222	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x95mm BAD
227096231	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x95mm BOD SP
227096232	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x95mm BOD
227096241	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x95mm BED SP
227096242	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x95mm BED
227096411	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x130mm BD SP
227096412	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x130mm BD
227096421	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x130mm BAD SP
227096422	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x130mm BAD
227096431	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x130mm BOD SP

Código do Produto	Descrição do Produto
227096432	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x130mm BOD
227096441	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x130mm BED SP
227096442	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x130mm BED
227096611	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x180mm BD SP
227096612	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x180mm BD
227096621	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x180mm BAD SP
227096622	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x180mm BAD
227096631	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x180mm BOD SP
227096632	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x180mm BOD
227096641	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x180mm BED SP
227096642	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x180mm BED
227096711	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x250mm BD SP
227096712	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x250mm BD
227096721	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x250mm BAD SP
227096722	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x250mm BAD
227096731	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x250mm BOD SP
227096732	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x250mm BOD
227096741	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x250mm BED SP
227096742	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x250mm BED
227096811	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x300mm BD SP
227096812	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x300mm BD
227096821	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x300mm BAD SP
227096822	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x300mm BAD
227096831	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x300mm BOD SP
227096832	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x300mm BOD
227096841	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x300mm BED SP
227096842	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x300mm BED
227096911	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x360mm BD SP
227096912	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x360mm BD
227096921	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x360mm BAD SP
227096922	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x360mm BAD
227096931	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x360mm BOD SP
227096932	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x360mm BOD
227096941	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x360mm BED SP

Código do Produto	Descrição do Produto
227096942	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC09, Ø5,0x360mm BED
227123211	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x95mm BD SP
227123212	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x95mm BD
227123221	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x95mm BAD SP
227123222	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x95mm BAD
227123223	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x95mm BAD PF
227123231	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x95mm BOD SP
227123232	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x95mm BOD
227123241	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x95mm BED SP
227123242	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x95mm BED
227123411	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x130mm BD SP
227123412	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x130mm BD
227123421	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x130mm BAD SP
227123422	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x130mm BAD
227123423	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x130mm BAD PF
227123431	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x130mm BOD SP
227123432	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x130mm BOD
227123441	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x130mm BED SP
227123442	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x130mm BED
227123611	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x180mm BD SP
227123612	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x180mm BD
227123621	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x180mm BAD SP
227123622	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x180mm BAD
227123623	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x180mm BAD PF
227123631	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x180mm BOD SP
227123632	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x180mm BOD
227123641	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x180mm BED SP
227123642	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x180mm BED
227123711	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x250mm BD SP
227123712	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x250mm BD
227123721	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x250mm BAD SP
227123722	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x250mm BAD
227123723	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x250mm BAD PF
227123731	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x250mm BOD SP

Código do Produto	Descrição do Produto
227123732	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x250mm BOD
227123741	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x250mm BED SP
227123742	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x250mm BED
227123811	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x300mm BD SP
227123812	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x300mm BD
227123821	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x300mm BAD SP
227123822	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x300mm BAD
227123823	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x300mm BAD PF
227123831	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x300mm BOD SP
227123832	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x300mm BOD
227123841	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x300mm BED SP
227123842	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x300mm BED
227123911	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x360mm BD SP
227123912	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x360mm BD
227123921	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x360mm BAD SP
227123922	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x360mm BAD
227123923	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x360mm BAD PF
227123931	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x360mm BOD SP
227123932	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x360mm BOD
227123941	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x360mm BED SP
227123942	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø3,5x360mm BED
227124211	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x95mm BD SP
227124212	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x95mm BD
227124221	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x95mm BAD SP
227124222	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x95mm BAD
227124223	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x95mm BAD PF
227124231	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x95mm BOD SP
227124232	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x95mm BOD
227124241	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x95mm BED SP
227124242	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x95mm BED
227124411	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x130mm BD SP
227124412	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x130mm BD
227124421	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x130mm BAD SP
227124422	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x130mm BAD

Código do Produto	Descrição do Produto
227124423	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x130mm BAD PF
227124431	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x130mm BOD SP
227124432	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x130mm BOD
227124441	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x130mm BED SP
227124442	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x130mm BED
227124611	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x180mm BD SP
227124612	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x180mm BD
227124621	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x180mm BAD SP
227124622	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x180mm BAD
227124623	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x180mm BAD PF
227124631	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x180mm BOD SP
227124632	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x180mm BOD
227124641	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x180mm BED SP
227124642	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x180mm BED
227124711	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x250mm BD SP
227124712	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x250mm BD
227124721	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x250mm BAD SP
227124722	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x250mm BAD
227124723	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x250mm BAD PF
227124731	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x250mm BOD SP
227124732	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x250mm BOD
227124741	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x250mm BED SP
227124742	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x250mm BED
227124811	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x300mm BD SP
227124812	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x300mm BD
227124821	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x300mm BAD SP
227124822	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x300mm BAD
227124823	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x300mm BAD PF
227124831	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x300mm BOD SP
227124832	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x300mm BOD
227124841	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x300mm BED SP
227124842	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x300mm BED
227124911	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x360mm BD SP
227124912	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x360mm BD

Código do Produto	Descrição do Produto
227124921	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x360mm BAD SP
227124922	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x360mm BAD
227124923	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x360mm BAD PF
227124931	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x360mm BOD SP
227124932	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x360mm BOD
227124941	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x360mm BED SP
227124942	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,0x360mm BED
227125211	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x95mm BD SP
227125212	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x95mm BD
227125221	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x95mm BAD SP
227125222	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x95mm BAD
227125231	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x95mm BOD SP
227125232	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x95mm BOD
227125241	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x95mm BED SP
227125242	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x95mm BED
227125411	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x130mm BD SP
227125412	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x130mm BD
227125421	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x130mm BAD SP
227125422	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x130mm BAD
227125431	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x130mm BOD SP
227125432	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x130mm BOD
227125441	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x130mm BED SP
227125442	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x130mm BED
227125611	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x180mm BD SP
227125612	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x180mm BD
227125621	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x180mm BAD SP
227125622	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x180mm BAD
227125631	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x180mm BOD SP
227125632	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x180mm BOD
227125641	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x180mm BED SP
227125642	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x180mm BED
227125711	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x250mm BD SP
227125712	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x250mm BD
227125721	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x250mm BAD SP

Código do Produto	Descrição do Produto
227125722	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x250mm BAD
227125731	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x250mm BOD SP
227125732	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x250mm BOD
227125741	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x250mm BED SP
227125742	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x250mm BED
227125811	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x300mm BD SP
227125812	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x300mm BD
227125821	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x300mm BAD SP
227125822	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x300mm BAD
227125831	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x300mm BOD SP
227125832	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x300mm BOD
227125841	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x300mm BED SP
227125842	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x300mm BED
227125911	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x360mm BD SP
227125912	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x360mm BD
227125921	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x360mm BAD SP
227125922	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x360mm BAD
227125931	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x360mm BOD SP
227125932	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x360mm BOD
227125941	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x360mm BED SP
227125942	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø4,5x360mm BED
227126211	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x95mm BD SP
227126212	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x95mm BD
227126221	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x95mm BAD SP
227126222	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x95mm BAD
227126231	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x95mm BOD SP
227126232	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x95mm BOD
227126241	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x95mm BED SP
227126242	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x95mm BED
227126411	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x130mm BD SP
227126412	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x130mm BD
227126421	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x130mm BAD SP
227126422	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x130mm BAD
227126431	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x130mm BOD SP

Código do Produto	Descrição do Produto
227126432	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x130mm BOD
227126441	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x130mm BED SP
227126442	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x130mm BED
227126611	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x180mm BD SP
227126612	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x180mm BD
227126621	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x180mm BAD SP
227126622	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x180mm BAD
227126631	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x180mm BOD SP
227126632	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x180mm BOD
227126641	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x180mm BED SP
227126642	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x180mm BED
227126711	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x250mm BD SP
227126712	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x250mm BD
227126721	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x250mm BAD SP
227126722	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x250mm BAD
227126731	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x250mm BOD SP
227126732	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x250mm BOD
227126741	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x250mm BED SP
227126742	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x250mm BED
227126811	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x300mm BD SP
227126812	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x300mm BD
227126821	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x300mm BAD SP
227126822	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x300mm BAD
227126831	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x300mm BOD SP
227126832	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x300mm BOD
227126841	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x300mm BED SP
227126842	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x300mm BED
227126911	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x360mm BD SP
227126912	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x360mm BD
227126921	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x360mm BAD SP
227126922	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x360mm BAD
227126931	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x360mm BOD SP
227126932	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x360mm BOD
227126941	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x360mm BED SP

Código do Produto	Descrição do Produto
227126942	CANULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, ENC12, Ø5,0x360mm BED

Cabe exclusivamente ao cirurgião a seleção do modelo comercial mais adequado ao paciente e ao procedimento cirúrgico a ser realizado, assim como a combinação de materiais e instrumentais cirúrgicos, que deverão estar de acordo com o caso clínico do paciente.

5. FINALIDADE DE USO

A CÂNULA DESBASTE DIAMANT COLUNA trata-se de um dispositivo diamantado, estéril, de uso único e reprocessamento proibido, indicado para procedimentos da coluna vertebral, cuja finalidade é promover a remoção controlada de tecido ósseo e tecidos moles, conforme necessidade clínica e cirúrgica de cada paciente.

O dispositivo deve ser utilizado como acessório ativo em conjunto com aparelhos de Shaver (no qual não compõe este registro), sendo destinado a aplicações em cirurgias endoscópicas ou minimamente invasivas da coluna, incluindo procedimentos que demandem descompressão de estruturas neurais, ampliação do espaço operatório, regularização óssea ou preparo do local cirúrgico.

Diferencial do produto: A ponta ativa diamantada proporciona desbaste por abrasão, sendo particularmente indicada para regularização fina de superfícies ósseas, remoção controlada de osteófitos e procedimentos que exigem menor agressividade térmica e mecânica sobre tecidos moles adjacentes. Este dispositivo não apresenta bordas cortantes afiadas.

O produto deve ser utilizado exclusivamente por profissionais de saúde habilitados e em ambiente cirúrgico apropriado, visando garantir a segurança do paciente e a integridade do desempenho do produto.

6. INSTRUÇÕES ESPECIAIS PARA OPERAÇÃO E/OU USO DO DISPOSITIVO MÉDICO

Antes da utilização do produto, certifique a integridade da embalagem e verifique a indicação de esterilização na rotulagem, assegurando que o prazo de validade da esterilidade não tenha expirado.

Para a utilização correta e segura da CÂNULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, recomenda-se seguir os seguintes procedimentos operacionais:

- Retire o produto da embalagem secundária e, em seguida, remova o blister estéril utilizando técnica asséptica, conforme protocolos de manuseio de produtos estéreis.
- Conecte a CÂNULA DESBASTE DIAMANT COLUNA à peça de mão compatível, previamente esterilizada e de acordo com as especificações técnicas do fabricante.
- Assegure-se de que a peça de mão esteja corretamente acoplada ao equipamento motorizado do tipo Shaver (presente em outro registro), previamente testado e conectado à rede elétrica adequada.
- Ligue o sistema Shaver e realize um teste funcional da CÂNULA DESBASTE DIAMANT COLUNA fora do campo operatório, verificando o funcionamento nos modos e faixas de rotação previsto pelo fabricante.
- Após realizado o teste funcional e certificando-se sobre o uso do produto de forma segura, inicie o procedimento cirúrgico.

Nota 1: É recomendado que o produto seja desembalado imediatamente antes do procedimento

cirúrgico, de forma a preservar as condições de esterilidade.

Nota 2: A utilização da CÂNULA DESBASTE DIAMANT COLUNA deve ser realizada exclusivamente na presença de solução de irrigação adequada, de forma externa, conforme protocolos clínicos.

Nota 3: Em caso de obstrução da cânula, é indicada a utilização da haste de limpeza.

Ao término do procedimento, orienta-se desligar o equipamento Shaver e desconectar a CÂNULA DESBASTE DIAMANT COLUNA e, em seguida, realizar o descarte de forma segura da cânula, conforme as diretrizes de gerenciamento de resíduos hospitalares (RDC nº 222/2018).

Atenção: Este produto é de uso único. Não reutilizar, reprocessar ou reesterilizar, uma vez que estas práticas podem comprometer a integridade estrutural e funcional do dispositivo, além de representar riscos de infecção ao paciente. O fabricante não se responsabiliza por danos decorrentes de uso diverso do especificado, técnica cirúrgica, reutilização ou reprocessamento. A responsabilidade sobre a adequação do produto à técnica e ao paciente é do cirurgião.

7. INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO CORRETO

• INSTALAÇÃO

Conecte cuidadosamente a CÂNULA DESBASTE DIAMANT COLUNA à peça de mão compatível, assegurando o encaixe firme e alinhado com o eixo do equipamento e, em seguida, conecte a peça de mão ao console do equipamento motorizado (Shaver), presente em outro registro, de acordo com as instruções técnicas do fabricante.

• CONFERÊNCIA DE FUNCIONAMENTO

Para a conferência de funcionamento da CÂNULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, deve-se inicialmente ativar a rotação da cânula fora do campo operatório para realização do teste funcional inicial.

Avalie os seguintes aspectos para garantir o desempenho e segurança do produto durante o uso:

- Geração de movimento rotacional contínuo e estável;
- Ausência de vibração anormal ou ruídos irregulares;
- Funcionamento adequado dos sistemas integrados de aspiração e irrigação.

Certifique-se de que o fluido de irrigação esteja ativo e devidamente ajustado de acordo com o procedimento. A utilização do dispositivo **CÂNULA DESBASTE DIAMANT COLUNA** sem o uso concomitante de irrigação externa durante o ato cirúrgico pode resultar em superaquecimento da cânula, comprometendo a integridade do sistema e a segurança do paciente.

Atenção: Em caso de obstrução da cânula durante a aspiração, recomenda-se a utilização da haste de limpeza para desobstrução segura e imediata do dispositivo.

• FREQUÊNCIA DE MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO

A CÂNULA DESBASTE DIAMANT COLUNA é de uso único e deve ser descartada após o procedimento cirúrgico. Sendo assim, não requer manutenção periódica e calibração.

8. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E MANIPULAÇÃO

A CÂNULA DESBASTE DIAMANT COLUNA deve ser armazenada de forma a preservar sua integridade física e esterilidade. O produto permanecerá estéril enquanto mantido dentro do prazo de validade, com a embalagem intacta, sem sinais de violação ou danos.

Recomenda-se que o produto seja armazenado em prateleiras metal ou vidro, elevadas do piso, de modo a permitir adequada higienização e evitar contaminação cruzada. O ambiente de armazenamento deve estar isento de poeira, partículas em suspensão ou qualquer outra forma de contaminação.

O armazenamento deve ocorrer em ambiente com boa ventilação, limpo, seco e livre de contaminações, com umidade relativa do ar conforme a rotulagem, protegido de luz solar direta, radiação ionizante e fontes de calor que possam elevar a temperatura do limite permitido e indicado na rotulagem do produto. O armazenamento deve ocorrer de forma segregada de materiais perfurocortantes, produtos químicos, inflamáveis, corrosivos, tóxicos ou de categorias distintas que possam comprometer a segurança ou esterilidade do dispositivo. A gestão do estoque deve assegurar que os primeiros produtos a entrarem no estoque sejam os primeiros a serem utilizados.

O produto deve ser transportado e armazenado em sua embalagem original, lacrada, sem violação e em condições que assegurem a preservação da integridade física da embalagem e a manutenção da esterilidade, evitando quedas, impactos ou contato com objetos pontiagudos ou pesados. Durante o transporte, o produto deve ser mantido em ambiente seco e protegido da exposição direta à luz solar, radiação ionizante, temperaturas extremas (> 45°C), partículas contaminantes ou substâncias perigosas (inflamáveis, corrosivas, tóxicas).

O manuseio do produto deve ser realizado exclusivamente por profissionais de saúde qualificados, com conhecimento técnico sobre a técnica cirúrgica e o uso de dispositivos estéreis, de acordo com os protocolos estabelecidos de biossegurança.

9. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- A esterilidade da CÂNULA DESBASTE DIAMANT COLUNA está garantida até a abertura ou violação da embalagem ou até o vencimento do prazo de validade indicado no rótulo. Não utilize o produto caso a embalagem esteja danificada, violada, com sinais de umidade ou fora do prazo de validade.
- Antes da utilização, o profissional deve verificar cuidadosamente o estado físico da embalagem e a integridade superficial do dispositivo. Dispositivos com deformações, trincas, descoloração, vibração anormal ou qualquer outra anomalia visível devem ser descartados.
- A utilização do produto deve ser realizada exclusivamente por profissionais legalmente habilitados e treinados, com conhecimento técnico adequado sobre a aplicação clínica do dispositivo, práticas assépticas e procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos.
- Este produto deve ser utilizado sob prescrição e supervisão médica, sendo de responsabilidade do cirurgião a escolha da técnica cirúrgica mais apropriada e a decisão de uso do dispositivo em cada situação clínica. O fabricante não se responsabiliza pela técnica cirúrgica adotada.
- Não utilize força excessiva ou realize movimentos de alavanca com a CÂNULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, essas ações podem comprometer a integridade do dispositivo, provocando fratura ou quebra

do componente, com risco de lesão ao paciente ou danos ao equipamento.

- A utilização do dispositivo sem a presença da irrigação externa adequada ou em presença de vibração excessiva pode resultar em superaquecimento da cânula e/ou da peça de mão, com risco potencial de lesão térmica ao paciente ou ao operador. A irrigação contínua durante o procedimento cirúrgico é obrigatória concomitantemente ao uso CÂNULA DESBASTE DIAMANT COLUNA.
- Evite o contato da cânula em movimento com outros instrumentos cirúrgicos, pois isso pode causar dano ao dispositivo, quebra, ou mau funcionamento, além de comprometer a segurança do procedimento.
- Este dispositivo não deve ser reprocessado, reesterilizado ou reutilizado. Após o uso, deve ser descartado em recipiente adequado para resíduos de serviço de saúde, conforme a RDC nº 222/2018, devido ao risco de contaminação biológica.
- Evite o armazenamento do produto em locais sujeitos a variações bruscas de pressão ou aceleração, como cabines pressurizadas, câmaras hiperbáricas ou durante transporte aéreo sem embalagem secundária protetora.
- Não há interferência recíproca em investigações ou tratamentos específicos decorrente do uso do produto.

10. DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS

Para uso adequado do produto, mandatoriamente faz-se necessário a conexão a uma peça de mão e, por sua vez, a um equipamento motorizado do tipo shaver, que NÃO fazem parte deste registro, e devem ser adquiridos separadamente.

11. CONTRAINDICAÇÕES

Não há contraindicações absolutas conhecidas quando utilizado conforme a finalidade. No entanto, contraindicações relativas incluem osteoporose severa, infecção ativa no local, pacientes com coagulopatias, uso próximo a estruturas neurais críticas sem visão adequada, ficando a critério do cirurgião a avaliação do risco-benefício.

12. ESTERILIZAÇÃO

A CÂNULA DESBASTE DIAMANT COLUNA é fornecida na condição estéril, e possui prazo de validade de 3 anos. É utilizado o método de esterilização por Óxido de Etileno, em conformidade com a norma ABNT NBR ISO 11135:2018 – Esterilização de produto de atenção à saúde – Óxido de etileno – Requisitos para desenvolvimento, validação e controle de rotina de um processo de esterilização de produtos para saúde.

As embalagens possuem indicadores de esterilização junto ao rótulo do produto.

A rotulagem do produto o identifica claramente como ESTÉRIL, assim como também identifica o tipo de esterilização e o prazo de validade.

Para a manutenção segura da esterilidade, o dispositivo médico deverá ser aberto somente no momento da utilização e manuseado em ambientes estéreis. Antes do uso verifique se o produto está dentro do prazo de

validade indicado.

Em caso de dano na embalagem protetora de esterilidade, não utilize o produto. A embalagem danificada compromete a esterilidade da CÂNULA DESBASTE DIAMANT COLUNA, invalidando sua segurança para uso médico.

13. DESCARTE

Os métodos e procedimentos de descarte deste dispositivo devem assegurar a sua completa descaracterização, impedindo qualquer possibilidade de reutilização.

Em casos onde o dispositivo médico tenha sido removido da embalagem primária e conduzido dentro do ambiente cirúrgico, mesmo sem que tenha sido utilizado, o mesmo deverá ser tratado como material contaminado.

Os descartes da cirurgia devem ser geridos sob a responsabilidade do estabelecimento que conduz o procedimento cirúrgico, assim como qualquer outro resíduo de saúde.








Nos casos em que ocorra a expiração da validade do produto, este deverá ser descartado corretamente, conforme legislações locais aplicáveis.










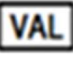

Deve ser seguido um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) para o manejo, segregação e acondicionamento de resíduos conforme a diretriz da RDC nº 222 de 28 de março de 2018, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, para mitigar os riscos imprevisíveis associados à eliminação de dispositivo - contaminação ambiental e risco biológico.

14. ROTULAGEM E RASTREABILIDADE

A rastreabilidade é garantida através da marcação a laser do número do lote no produto. A rotulagem do dispositivo está fixada junto à embalagem secundária e possui informações necessárias à identificação do produto e as simbologias, em conformidade com ABNT NBR ISO 15223-1– Dispositivos médicos – Símbolos a serem usados em informações fornecidas pelo fabricante – Parte 1: Requisitos Gerais.

Tabela 3. Simbologia da Rotulagem.

Símbolo	Descrição
	Data de Fabricação
	Usar até a data (prazo de validade)
	Proteger de luz solar
	Frágil, manusear com cuidado
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada e consultar as instruções de uso
	Consultar as instruções de uso ou consultar as instruções eletrônicas de uso
	Manter seco

Símbolo	Descrição
	Fabricante
	Cuidado
	Esterilizado com óxido de etileno
	Não reusar
	Não reesterilizar
	Limite superior de temperatura
	Limitação de umidade
	Número de catálogo
	Código do lote
	Data de validade
	Data de fabricação

Dentro da embalagem secundária são disponibilizadas as etiquetas de rastreabilidade e recomenda-se o uso conforme indicado abaixo:

- a) **Etiqueta 1:** fixada ao documento no momento da entrega do material ao hospital;
- b) **Etiqueta 2:** fixada na nota fiscal de venda;
- c) **Etiqueta 3:** fixada no prontuário do paciente;
- d) **Etiqueta 4:** fixada na documentação a ser entregue ao paciente, para ciência das informações referentes ao dispositivo médico.

15. ATENDIMENTO AO CLIENTE E RECLAMAÇÕES

Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico não descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Setormed através do e-mail: sac@setormed.com.br ou telefone: (16) 3416-5398.

O setor responsável fará o envio do formulário de queixa que deve ser preenchido.

Separe o produto para envio, limpo de sujidades e de material biológico, embalado em saco plástico fechado, identificado com a etiqueta do procedimento e com os dados do produto. É mandatória a informação de código, número de lote e número de registro do produto.

Fabricante/ Detentor do Registro

Setormed Indústria e Comércio de Equipamentos

Médicos e Odontológicos S.A.

Rua Arthur Rodrigues de Castro, 150 – Jd. São Paulo,
São Carlos/SP

CEP: 13570-410

CNPJ: 13.533.397/0001-29 – INDÚSTRIA BRASILEIRA

Site: www.setormed.com.br

Telefone: (16) 3416-539