

# INSTRUÇÃO DE USO

**NOME TÉCNICO: CÂNULAS**

**NOME COMERCIAL: CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO TP**

**Fabricante:**

**SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS S.A.**

**CNPJ:** 13.533.397/0001-29

**RUA ARTHUR RODRIGUES DE CASTRO, 150 – JARDIM SÃO PAULO – SÃO CARLOS.**

**CEP:** 13570-410

**Responsável Técnico:**

**Ricardo Luiz Vicentim – CREA-SP 5062789745**

**REGISTRO ANVISA Nº 80777280129**

**PRODUTO ESTÉRIL**

## Instrução de Uso

### Características e especificações técnicas do produto

**Nome Técnico:** Cânulas

**Nome Comercial:** Cânula de Debridação TP

**Matéria Prima:** Aço Inoxidável 304, Aço Inoxidável 455, Policarbonato, Politetrafluoretileno

**Produto Estéril**

**Método de Esterilização:** Radiação Gama ou Peróxido de Hidrogênio ou Óxido de Etileno (ETO).

### 1. Forma de Apresentação Comercial do Produto

A CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO TP é apresentada em embalagem que contém 2 CÂNULAS que é acondicionada da seguinte maneira:

**Embalagem primária:** Cânulas com 95 mm; 130 mm e 180mm:

Bandeja blister de polietileno tereftalato (PET) virgem espessura de 0,7 mm com fechamento em Tyvek 1073B com laca.

**Embalagem Primária:** Cânulas com 300mm:

Embalagem termosselável tipo sachê em papel grau cirúrgico (gramatura) 70gr/m<sup>2</sup> com e filme plástico laminado (Polipropileno e Poliéster, com gramatura 56gr/m<sup>2</sup>).

**Embalagem secundária:** Caixa de papel cartão nas especificações:

- Gramatura: 400 gr;
- Cola: PVC Branca.
- Filme poliolefinico para proteção de 19 g/m<sup>2</sup>

### 2. Modelos Comerciais

215 05 01 01 Cânula de debridação Tipo05 APC  
215 05 01 02 Cânula de debridação Tipo05 APCR  
215 05 01 03 Cânula de debridação Tipo05 BA  
215 05 01 04 Cânula de debridação Tipo05 BO  
215 05 01 05 Cânula de debridação Tipo05 BR  
215 05 01 07 Cânula de debridação Tipo05 CM  
215 05 01 08 Cânula de debridação Tipo05 CMA  
215 05 01 09 Cânula de debridação Tipo05 INC  
215 05 01 10 Cânula de debridação Tipo05 RPC  
215 05 04 01 Cânula de debridação Tipo05 APC  
215 05 04 02 Cânula de debridação Tipo05 APCR  
215 05 04 03 Cânula de debridação Tipo05 BA  
215 05 04 04 Cânula de debridação Tipo05 BO

215 05 04 05 Cânula de debridação Tipo05 BR  
215 05 04 07 Cânula de debridação Tipo05 CM  
215 05 04 08 Cânula de debridação Tipo05 CMA  
215 05 04 09 Cânula de debridação Tipo05 INC  
215 05 04 10 Cânula de debridação Tipo05 RPC  
215 05 23 01 Cânula de debridação Tipo05 APC  
215 05 23 02 Cânula de debridação Tipo05 APCR  
215 05 23 03 Cânula de debridação Tipo05 BA  
215 05 23 04 Cânula de debridação Tipo05 BO  
215 05 23 05 Cânula de debridação Tipo05 BR  
215 05 23 07 Cânula de debridação Tipo05 CM  
215 05 23 08 Cânula de debridação Tipo05 CMA  
215 05 23 09 Cânula de debridação Tipo05 INC  
215 05 23 10 Cânula de debridação Tipo05 RPC  
215 05 24 01 Cânula de debridação Tipo05 APC  
215 06 01 01 Cânula de debridação Tipo06 APC  
215 06 01 02 Cânula de debridação Tipo06 APCR  
215 06 01 03 Cânula de debridação Tipo06 BA  
215 06 01 04 Cânula de debridação Tipo06 BO  
215 06 01 05 Cânula de debridação Tipo06 BR  
215 06 01 07 Cânula de debridação Tipo06 CM  
215 06 01 08 Cânula de debridação Tipo06 CMA  
215 06 01 09 Cânula de debridação Tipo06 INC  
215 06 01 10 Cânula de debridação Tipo06 RPC  
215 06 04 01 Cânula de debridação Tipo06 APC  
215 06 04 02 Cânula de debridação Tipo06 APCR  
215 06 04 03 Cânula de debridação Tipo06 BA  
215 06 04 04 Cânula de debridação Tipo06 BO  
215 06 04 05 Cânula de debridação Tipo06 BR  
215 06 04 07 Cânula de debridação Tipo06 CM  
215 06 04 08 Cânula de debridação Tipo06 CMA  
215 06 04 09 Cânula de debridação Tipo06 INC  
215 06 04 10 Cânula de debridação Tipo06 RPC  
215 06 23 01 Cânula de debridação Tipo06 APC  
215 06 23 02 Cânula de debridação Tipo06 APCR  
215 06 23 03 Cânula de debridação Tipo06 BA  
215 06 23 04 Cânula de debridação Tipo06 BO  
215 06 23 05 Cânula de debridação Tipo06 BR  
215 06 23 07 Cânula de debridação Tipo06 CM  
215 06 23 08 Cânula de debridação Tipo06 CMA  
215 06 23 09 Cânula de debridação Tipo06 INC  
215 06 23 10 Cânula de debridação Tipo06 RPC  
215 07 01 01 Cânula de debridação Tipo07 APC  
215 07 01 02 Cânula de debridação Tipo07 APCR  
215 07 01 03 Cânula de debridação Tipo07 BA  
215 07 01 04 Cânula de debridação Tipo07 BO  
215 07 01 05 Cânula de debridação Tipo07 BR  
215 07 01 07 Cânula de debridação Tipo07 CM  
215 07 01 08 Cânula de debridação Tipo07 CMA  
215 07 01 09 Cânula de debridação Tipo07 INC  
215 07 01 10 Cânula de debridação Tipo07 RPC  
215 07 04 01 Cânula de debridação Tipo07 APC  
215 07 04 02 Cânula de debridação Tipo07 APCR  
215 07 04 03 Cânula de debridação Tipo07 BA  
215 07 04 04 Cânula de debridação Tipo07 BO  
215 07 04 05 Cânula de debridação Tipo07 BR

215 07 04 07 Cânula de debridação Tipo07 CM  
215 07 04 08 Cânula de debridação Tipo07 CMA  
215 07 04 09 Cânula de debridação Tipo07 INC  
215 07 04 10 Cânula de debridação Tipo07 RPC  
215 07 23 01 Cânula de debridação Tipo07 APC  
215 07 23 02 Cânula de debridação Tipo07 APCR  
215 07 23 03 Cânula de debridação Tipo07 BA  
215 07 23 04 Cânula de debridação Tipo07 BO  
215 07 23 05 Cânula de debridação Tipo07 BR  
215 07 23 07 Cânula de debridação Tipo07 CM  
215 07 23 08 Cânula de debridação Tipo07 CMA  
215 07 23 09 Cânula de debridação Tipo07 INC  
215 07 23 10 Cânula de debridação Tipo07 RPC  
215 09 01 01 Cânula de debridação Tipo09 APC  
215 09 01 02 Cânula de debridação Tipo09 APCR  
215 09 01 03 Cânula de debridação Tipo09 BA  
215 09 01 04 Cânula de debridação Tipo09 BO  
215 09 01 05 Cânula de debridação Tipo09 BR  
215 09 01 07 Cânula de debridação Tipo09 CM  
215 09 01 08 Cânula de debridação Tipo09 CMA  
215 09 01 09 Cânula de debridação Tipo09 INC  
215 09 01 10 Cânula de debridação Tipo09 RPC  
215 09 04 01 Cânula de debridação Tipo09 APC  
215 09 04 02 Cânula de debridação Tipo09 APCR  
215 09 04 03 Cânula de debridação Tipo09 BA  
215 09 04 04 Cânula de debridação Tipo09 BO  
215 09 04 05 Cânula de debridação Tipo09 BR  
215 09 04 07 Cânula de debridação Tipo09 CM  
215 09 04 08 Cânula de debridação Tipo09 CMA  
215 09 04 09 Cânula de debridação Tipo09 INC  
215 09 04 10 Cânula de debridação Tipo09 RPC  
215 09 23 01 Cânula de debridação Tipo09 APC  
215 09 23 02 Cânula de debridação Tipo09 APCR  
215 09 23 03 Cânula de debridação Tipo09 BA  
215 09 23 04 Cânula de debridação Tipo09 BO  
215 09 23 05 Cânula de debridação Tipo09 BR  
215 09 23 07 Cânula de debridação Tipo09 CM  
215 09 23 08 Cânula de debridação Tipo09 CMA  
215 09 23 09 Cânula de debridação Tipo09 INC  
215 09 23 10 Cânula de debridação Tipo09 RPC  
215 12 01 01 Cânula de debridação Tipo12 APC  
215 12 01 02 Cânula de debridação Tipo12 APCR  
215 12 01 03 Cânula de debridação Tipo12 BA  
215 12 01 04 Cânula de debridação Tipo12 BO  
215 12 01 05 Cânula de debridação Tipo12 BR  
215 12 01 07 Cânula de debridação Tipo12 CM  
215 12 01 08 Cânula de debridação Tipo12 CMA  
215 12 01 09 Cânula de debridação Tipo12 INC  
215 12 01 10 Cânula de debridação Tipo12 RPC  
215 12 04 01 Cânula de debridação Tipo12 APC  
215 12 04 02 Cânula de debridação Tipo12 APCR  
215 12 04 03 Cânula de debridação Tipo12 BA  
215 12 04 04 Cânula de debridação Tipo12 BO  
215 12 04 05 Cânula de debridação Tipo12 BR  
215 12 04 07 Cânula de debridação Tipo12 CM  
215 12 04 08 Cânula de debridação Tipo12 CMA

215 12 04 09 Cânula de debridação Tipo12 INC  
215 12 04 10 Cânula de debridação Tipo12 RPC  
215 12 23 01 Cânula de debridação Tipo12 APC  
215 12 23 02 Cânula de debridação Tipo12 APCR  
215 12 23 03 Cânula de debridação Tipo12 BA  
215 12 23 04 Cânula de debridação Tipo12 BO  
215 12 23 05 Cânula de debridação Tipo12 BR  
215 12 23 07 Cânula de debridação Tipo12 CM  
215 12 23 08 Cânula de debridação Tipo12 CMA  
215 12 23 09 Cânula de debridação Tipo12 INC  
215 12 23 10 Cânula de debridação Tipo12 RPC  
215 05 02 01 Cânula de debridação Tipo05 APC  
215 05 02 02 Cânula de debridação Tipo05 APCR  
215 05 02 03 Cânula de debridação Tipo05 BA  
215 05 02 04 Cânula de debridação Tipo05 BO  
215 05 02 05 Cânula de debridação Tipo05 BR  
215 05 02 07 Cânula de debridação Tipo05 CM  
215 05 02 08 Cânula de debridação Tipo05 CMA  
215 05 02 09 Cânula de debridação Tipo05 INC  
215 05 02 10 Cânula de debridação Tipo05 RPC  
215 05 03 01 Cânula de debridação Tipo05 APC  
215 05 03 02 Cânula de debridação Tipo05 APCR  
215 05 03 03 Cânula de debridação Tipo05 BA  
215 05 03 04 Cânula de debridação Tipo05 BO  
215 05 03 05 Cânula de debridação Tipo05 BR  
215 05 03 07 Cânula de debridação Tipo05 CM  
215 05 03 08 Cânula de debridação Tipo05 CMA  
215 05 03 09 Cânula de debridação Tipo05 INC  
215 05 03 10 Cânula de debridação Tipo05 RPC  
215 05 05 01 Cânula de debridação Tipo05 APC  
215 05 05 02 Cânula de debridação Tipo05 APCR  
215 05 05 03 Cânula de debridação Tipo05 BA  
215 05 05 04 Cânula de debridação Tipo05 BO  
215 05 05 05 Cânula de debridação Tipo05 BR  
215 05 05 07 Cânula de debridação Tipo05 CM  
215 05 05 08 Cânula de debridação Tipo05 CMA  
215 05 05 09 Cânula de debridação Tipo05 INC  
215 05 05 10 Cânula de debridação Tipo05 RPC  
215 05 06 01 Cânula de debridação Tipo05 APC  
215 05 06 02 Cânula de debridação Tipo05 APCR  
215 05 06 03 Cânula de debridação Tipo05 BA  
215 05 06 04 Cânula de debridação Tipo05 BO  
215 05 06 05 Cânula de debridação Tipo05 BR  
215 05 06 07 Cânula de debridação Tipo05 CM  
215 05 06 08 Cânula de debridação Tipo05 CMA  
215 05 06 09 Cânula de debridação Tipo05 INC  
215 05 06 10 Cânula de debridação Tipo05 RPC  
215 05 22 01 Cânula de debridação Tipo05 APC  
215 05 22 02 Cânula de debridação Tipo05 APCR  
215 05 22 03 Cânula de debridação Tipo05 BA  
215 05 22 04 Cânula de debridação Tipo05 BO  
215 05 22 05 Cânula de debridação Tipo05 BR  
215 05 22 07 Cânula de debridação Tipo05 CM  
215 05 22 08 Cânula de debridação Tipo05 CMA  
215 05 22 09 Cânula de debridação Tipo05 INC  
215 05 22 10 Cânula de debridação Tipo05 RPC

215 05 24 02 Cânula de debridação Tipo05 APCR  
215 05 24 03 Cânula de debridação Tipo05 BA  
215 05 24 04 Cânula de debridação Tipo05 BO  
215 05 24 05 Cânula de debridação Tipo05 BR  
215 05 24 07 Cânula de debridação Tipo05 CM  
215 05 24 08 Cânula de debridação Tipo05 CMA  
215 05 24 09 Cânula de debridação Tipo05 INC  
215 05 24 10 Cânula de debridação Tipo05 RPC  
215 05 25 01 Cânula de debridação Tipo05 APC  
215 05 25 02 Cânula de debridação Tipo05 APCR  
215 05 25 03 Cânula de debridação Tipo05 BA  
215 05 25 04 Cânula de debridação Tipo05 BO  
215 05 25 05 Cânula de debridação Tipo05 BR  
215 05 25 07 Cânula de debridação Tipo05 CM  
215 05 25 08 Cânula de debridação Tipo05 CMA  
215 05 25 09 Cânula de debridação Tipo05 INC  
215 05 25 10 Cânula de debridação Tipo05 RPC  
215 05 26 01 Cânula de debridação Tipo05 APC  
215 05 26 02 Cânula de debridação Tipo05 APCR  
215 05 26 03 Cânula de debridação Tipo05 BA  
215 05 26 04 Cânula de debridação Tipo05 BO  
215 05 26 05 Cânula de debridação Tipo05 BR  
215 05 26 07 Cânula de debridação Tipo05 CM  
215 05 26 08 Cânula de debridação Tipo05 CMA  
215 05 26 09 Cânula de debridação Tipo05 INC  
215 05 26 10 Cânula de debridação Tipo05 RPC  
215 05 27 01 Cânula de debridação Tipo05 APC  
215 05 27 02 Cânula de debridação Tipo05 APCR  
215 05 27 03 Cânula de debridação Tipo05 BA  
215 05 27 04 Cânula de debridação Tipo05 BO  
215 05 27 05 Cânula de debridação Tipo05 BR  
215 05 27 07 Cânula de debridação Tipo05 CM  
215 05 27 08 Cânula de debridação Tipo05 CMA  
215 05 27 09 Cânula de debridação Tipo05 INC  
215 05 27 10 Cânula de debridação Tipo05 RPC  
215 06 02 01 Cânula de debridação Tipo06 APC  
215 06 02 02 Cânula de debridação Tipo06 APCR  
215 06 02 03 Cânula de debridação Tipo06 BA  
215 06 02 04 Cânula de debridação Tipo06 BO  
215 06 02 05 Cânula de debridação Tipo06 BR  
215 06 02 07 Cânula de debridação Tipo06 CM  
215 06 02 08 Cânula de debridação Tipo06 CMA  
215 06 02 09 Cânula de debridação Tipo06 INC  
215 06 02 10 Cânula de debridação Tipo06 RPC  
215 06 03 01 Cânula de debridação Tipo06 APC  
215 06 03 02 Cânula de debridação Tipo06 APCR  
215 06 03 03 Cânula de debridação Tipo06 BA  
215 06 03 04 Cânula de debridação Tipo06 BO  
215 06 03 05 Cânula de debridação Tipo06 BR  
215 06 03 07 Cânula de debridação Tipo06 CM  
215 06 03 08 Cânula de debridação Tipo06 CMA  
215 06 03 09 Cânula de debridação Tipo06 INC  
215 06 03 10 Cânula de debridação Tipo06 RPC  
215 06 05 01 Cânula de debridação Tipo06 APC  
215 06 05 02 Cânula de debridação Tipo06 APCR  
215 06 05 03 Cânula de debridação Tipo06 BA

215 06 05 04 Cânula de debridação Tipo06 BO  
215 06 05 05 Cânula de debridação Tipo06 BR  
215 06 05 07 Cânula de debridação Tipo06 CM  
215 06 05 08 Cânula de debridação Tipo06 CMA  
215 06 05 09 Cânula de debridação Tipo06 INC  
215 06 05 10 Cânula de debridação Tipo06 RPC  
215 06 06 01 Cânula de debridação Tipo06 APC  
215 06 06 02 Cânula de debridação Tipo06 APCR  
215 06 06 03 Cânula de debridação Tipo06 BA  
215 06 06 04 Cânula de debridação Tipo06 BO  
215 06 06 05 Cânula de debridação Tipo06 BR  
215 06 06 07 Cânula de debridação Tipo06 CM  
215 06 06 08 Cânula de debridação Tipo06 CMA  
215 06 06 09 Cânula de debridação Tipo06 INC  
215 06 06 10 Cânula de debridação Tipo06 RPC  
215 06 22 01 Cânula de debridação Tipo06 APC  
215 06 22 02 Cânula de debridação Tipo06 APCR  
215 06 22 03 Cânula de debridação Tipo06 BA  
215 06 22 04 Cânula de debridação Tipo06 BO  
215 06 22 05 Cânula de debridação Tipo06 BR  
215 06 22 07 Cânula de debridação Tipo06 CM  
215 06 22 08 Cânula de debridação Tipo06 CMA  
215 06 22 09 Cânula de debridação Tipo06 INC  
215 06 22 10 Cânula de debridação Tipo06 RPC  
215 06 24 01 Cânula de debridação Tipo06 APC  
215 06 24 02 Cânula de debridação Tipo06 APCR  
215 06 24 03 Cânula de debridação Tipo06 BA  
215 06 24 04 Cânula de debridação Tipo06 BO  
215 06 24 05 Cânula de debridação Tipo06 BR  
215 06 24 07 Cânula de debridação Tipo06 CM  
215 06 24 08 Cânula de debridação Tipo06 CMA  
215 06 24 09 Cânula de debridação Tipo06 INC  
215 06 24 10 Cânula de debridação Tipo06 RPC  
215 06 25 01 Cânula de debridação Tipo06 APC  
215 06 25 02 Cânula de debridação Tipo06 APCR  
215 06 25 03 Cânula de debridação Tipo06 BA  
215 06 25 04 Cânula de debridação Tipo06 BO  
215 06 25 05 Cânula de debridação Tipo06 BR  
215 06 25 07 Cânula de debridação Tipo06 CM  
215 06 25 08 Cânula de debridação Tipo06 CMA  
215 06 25 09 Cânula de debridação Tipo06 INC  
215 06 25 10 Cânula de debridação Tipo06 RPC  
215 06 26 01 Cânula de debridação Tipo06 APC  
215 06 26 02 Cânula de debridação Tipo06 APCR  
215 06 26 03 Cânula de debridação Tipo06 BA  
215 06 26 04 Cânula de debridação Tipo06 BO  
215 06 26 05 Cânula de debridação Tipo06 BR  
215 06 26 07 Cânula de debridação Tipo06 CM  
215 06 26 08 Cânula de debridação Tipo06 CMA  
215 06 26 09 Cânula de debridação Tipo06 INC  
215 06 26 10 Cânula de debridação Tipo06 RPC  
215 06 27 01 Cânula de debridação Tipo06 APC  
215 06 27 02 Cânula de debridação Tipo06 APCR  
215 06 27 03 Cânula de debridação Tipo06 BA  
215 06 27 04 Cânula de debridação Tipo06 BO  
215 06 27 05 Cânula de debridação Tipo06 BR

215 06 27 07 Cânula de debridação Tipo06 CM  
215 06 27 08 Cânula de debridação Tipo06 CMA  
215 06 27 09 Cânula de debridação Tipo06 INC  
215 06 27 10 Cânula de debridação Tipo06 RPC  
215 07 02 01 Cânula de debridação Tipo07 APC  
215 07 02 02 Cânula de debridação Tipo07 APCR  
215 07 02 03 Cânula de debridação Tipo07 BA  
215 07 02 04 Cânula de debridação Tipo07 BO  
215 07 02 05 Cânula de debridação Tipo07 BR  
215 07 02 07 Cânula de debridação Tipo07 CM  
215 07 02 08 Cânula de debridação Tipo07 CMA  
215 07 02 09 Cânula de debridação Tipo07 INC  
215 07 02 10 Cânula de debridação Tipo07 RPC  
215 07 03 01 Cânula de debridação Tipo07 APC  
215 07 03 02 Cânula de debridação Tipo07 APCR  
215 07 03 03 Cânula de debridação Tipo07 BA  
215 07 03 04 Cânula de debridação Tipo07 BO  
215 07 03 05 Cânula de debridação Tipo07 BR  
215 07 03 07 Cânula de debridação Tipo07 CM  
215 07 03 08 Cânula de debridação Tipo07 CMA  
215 07 03 09 Cânula de debridação Tipo07 INC  
215 07 03 10 Cânula de debridação Tipo07 RPC  
215 07 05 01 Cânula de debridação Tipo07 APC  
215 07 05 02 Cânula de debridação Tipo07 APCR  
215 07 05 03 Cânula de debridação Tipo07 BA  
215 07 05 04 Cânula de debridação Tipo07 BO  
215 07 05 05 Cânula de debridação Tipo07 BR  
215 07 05 07 Cânula de debridação Tipo07 CM  
215 07 05 08 Cânula de debridação Tipo07 CMA  
215 07 05 09 Cânula de debridação Tipo07 INC  
215 07 05 10 Cânula de debridação Tipo07 RPC  
215 07 06 01 Cânula de debridação Tipo07 APC  
215 07 06 02 Cânula de debridação Tipo07 APCR  
215 07 06 03 Cânula de debridação Tipo07 BA  
215 07 06 04 Cânula de debridação Tipo07 BO  
215 07 06 05 Cânula de debridação Tipo07 BR  
215 07 06 07 Cânula de debridação Tipo07 CM  
215 07 06 08 Cânula de debridação Tipo07 CMA  
215 07 06 09 Cânula de debridação Tipo07 INC  
215 07 06 10 Cânula de debridação Tipo07 RPC  
215 07 22 01 Cânula de debridação Tipo07 APC  
215 07 22 02 Cânula de debridação Tipo07 APCR  
215 07 22 03 Cânula de debridação Tipo07 BA  
215 07 22 04 Cânula de debridação Tipo07 BO  
215 07 22 05 Cânula de debridação Tipo07 BR  
215 07 22 07 Cânula de debridação Tipo07 CM  
215 07 22 08 Cânula de debridação Tipo07 CMA  
215 07 22 09 Cânula de debridação Tipo07 INC  
215 07 22 10 Cânula de debridação Tipo07 RPC  
215 07 24 01 Cânula de debridação Tipo07 APC  
215 07 24 02 Cânula de debridação Tipo07 APCR  
215 07 24 03 Cânula de debridação Tipo07 BA  
215 07 24 04 Cânula de debridação Tipo07 BO  
215 07 24 05 Cânula de debridação Tipo07 BR  
215 07 24 07 Cânula de debridação Tipo07 CM  
215 07 24 08 Cânula de debridação Tipo07 CMA



215 07 24 09 Cânula de debridação Tipo07 INC  
215 07 24 10 Cânula de debridação Tipo07 RPC  
215 07 25 01 Cânula de debridação Tipo07 APC  
215 07 25 02 Cânula de debridação Tipo07 APCR  
215 07 25 03 Cânula de debridação Tipo07 BA  
215 07 25 04 Cânula de debridação Tipo07 BO  
215 07 25 05 Cânula de debridação Tipo07 BR  
215 07 25 07 Cânula de debridação Tipo07 CM  
215 07 25 08 Cânula de debridação Tipo07 CMA  
215 07 25 09 Cânula de debridação Tipo07 INC  
215 07 25 10 Cânula de debridação Tipo07 RPC  
215 07 26 01 Cânula de debridação Tipo07 APC  
215 07 26 02 Cânula de debridação Tipo07 APCR  
215 07 26 03 Cânula de debridação Tipo07 BA  
215 07 26 04 Cânula de debridação Tipo07 BO  
215 07 26 05 Cânula de debridação Tipo07 BR  
215 07 26 07 Cânula de debridação Tipo07 CM  
215 07 26 08 Cânula de debridação Tipo07 CMA  
215 07 26 09 Cânula de debridação Tipo07 INC  
215 07 26 10 Cânula de debridação Tipo07 RPC  
215 07 27 01 Cânula de debridação Tipo07 APC  
215 07 27 02 Cânula de debridação Tipo07 APCR  
215 07 27 03 Cânula de debridação Tipo07 BA  
215 07 27 04 Cânula de debridação Tipo07 BO  
215 07 27 05 Cânula de debridação Tipo07 BR  
215 07 27 07 Cânula de debridação Tipo07 CM  
215 07 27 08 Cânula de debridação Tipo07 CMA  
215 07 27 09 Cânula de debridação Tipo07 INC  
215 07 27 10 Cânula de debridação Tipo07 RPC  
215 09 02 01 Cânula de debridação Tipo09 APC  
215 09 02 02 Cânula de debridação Tipo09 APCR  
215 09 02 03 Cânula de debridação Tipo09 BA  
215 09 02 04 Cânula de debridação Tipo09 BO  
215 09 02 05 Cânula de debridação Tipo09 BR  
215 09 02 07 Cânula de debridação Tipo09 CM  
215 09 02 08 Cânula de debridação Tipo09 CMA  
215 09 02 09 Cânula de debridação Tipo09 INC  
215 09 02 10 Cânula de debridação Tipo09 RPC  
215 09 03 01 Cânula de debridação Tipo09 APC  
215 09 03 02 Cânula de debridação Tipo09 APCR  
215 09 03 03 Cânula de debridação Tipo09 BA  
215 09 03 04 Cânula de debridação Tipo09 BO  
215 09 03 05 Cânula de debridação Tipo09 BR  
215 09 03 07 Cânula de debridação Tipo09 CM  
215 09 03 08 Cânula de debridação Tipo09 CMA  
215 09 03 09 Cânula de debridação Tipo09 INC  
215 09 03 10 Cânula de debridação Tipo09 RPC  
215 09 05 01 Cânula de debridação Tipo09 APC  
215 09 05 02 Cânula de debridação Tipo09 APCR  
215 09 05 03 Cânula de debridação Tipo09 BA  
215 09 05 04 Cânula de debridação Tipo09 BO  
215 09 05 05 Cânula de debridação Tipo09 BR  
215 09 05 07 Cânula de debridação Tipo09 CM  
215 09 05 08 Cânula de debridação Tipo09 CMA  
215 09 05 09 Cânula de debridação Tipo09 INC  
215 09 05 10 Cânula de debridação Tipo09 RPC

215 09 06 01 Cânula de debridação Tipo09 APC  
215 09 06 02 Cânula de debridação Tipo09 APCR  
215 09 06 03 Cânula de debridação Tipo09 BA  
215 09 06 04 Cânula de debridação Tipo09 BO  
215 09 06 05 Cânula de debridação Tipo09 BR  
215 09 06 07 Cânula de debridação Tipo09 CM  
215 09 06 08 Cânula de debridação Tipo09 CMA  
215 09 06 09 Cânula de debridação Tipo09 INC  
215 09 06 10 Cânula de debridação Tipo09 RPC  
215 09 22 01 Cânula de debridação Tipo09 APC  
215 09 22 02 Cânula de debridação Tipo09 APCR  
215 09 22 03 Cânula de debridação Tipo09 BA  
215 09 22 04 Cânula de debridação Tipo09 BO  
215 09 22 05 Cânula de debridação Tipo09 BR  
215 09 22 07 Cânula de debridação Tipo09 CM  
215 09 22 08 Cânula de debridação Tipo09 CMA  
215 09 22 09 Cânula de debridação Tipo09 INC  
215 09 22 10 Cânula de debridação Tipo09 RPC  
215 09 24 01 Cânula de debridação Tipo09 APC  
215 09 24 02 Cânula de debridação Tipo09 APCR  
215 09 24 03 Cânula de debridação Tipo09 BA  
215 09 24 04 Cânula de debridação Tipo09 BO  
215 09 24 05 Cânula de debridação Tipo09 BR  
215 09 24 07 Cânula de debridação Tipo09 CM  
215 09 24 08 Cânula de debridação Tipo09 CMA  
215 09 24 09 Cânula de debridação Tipo09 INC  
215 09 24 10 Cânula de debridação Tipo09 RPC  
215 09 25 01 Cânula de debridação Tipo09 APC  
215 09 25 02 Cânula de debridação Tipo09 APCR  
215 09 25 03 Cânula de debridação Tipo09 BA  
215 09 25 04 Cânula de debridação Tipo09 BO  
215 09 25 05 Cânula de debridação Tipo09 BR  
215 09 25 07 Cânula de debridação Tipo09 CM  
215 09 25 08 Cânula de debridação Tipo09 CMA  
215 09 25 09 Cânula de debridação Tipo09 INC  
215 09 25 10 Cânula de debridação Tipo09 RPC  
215 09 26 01 Cânula de debridação Tipo09 APC  
215 09 26 02 Cânula de debridação Tipo09 APCR  
215 09 26 03 Cânula de debridação Tipo09 BA  
215 09 26 04 Cânula de debridação Tipo09 BO  
215 09 26 05 Cânula de debridação Tipo09 BR  
215 09 26 07 Cânula de debridação Tipo09 CM  
215 09 26 08 Cânula de debridação Tipo09 CMA  
215 09 26 09 Cânula de debridação Tipo09 INC  
215 09 26 10 Cânula de debridação Tipo09 RPC  
215 09 27 01 Cânula de debridação Tipo09 APC  
215 09 27 02 Cânula de debridação Tipo09 APCR  
215 09 27 03 Cânula de debridação Tipo09 BA  
215 09 27 04 Cânula de debridação Tipo09 BO  
215 09 27 05 Cânula de debridação Tipo09 BR  
215 09 27 07 Cânula de debridação Tipo09 CM  
215 09 27 08 Cânula de debridação Tipo09 CMA  
215 09 27 09 Cânula de debridação Tipo09 INC  
215 09 27 10 Cânula de debridação Tipo09 RPC  
215 12 02 01 Cânula de debridação Tipo12 APC  
215 12 02 02 Cânula de debridação Tipo12 APCR

215 12 02 03 Cânula de debridação Tipo12 BA  
215 12 02 04 Cânula de debridação Tipo12 BO  
215 12 02 05 Cânula de debridação Tipo12 BR  
215 12 02 07 Cânula de debridação Tipo12 CM  
215 12 02 08 Cânula de debridação Tipo12 CMA  
215 12 02 09 Cânula de debridação Tipo12 INC  
215 12 02 10 Cânula de debridação Tipo12 RPC  
215 12 03 01 Cânula de debridação Tipo12 APC  
215 12 03 02 Cânula de debridação Tipo12 APCR  
215 12 03 03 Cânula de debridação Tipo12 BA  
215 12 03 04 Cânula de debridação Tipo12 BO  
215 12 03 05 Cânula de debridação Tipo12 BR  
215 12 03 07 Cânula de debridação Tipo12 CM  
215 12 03 08 Cânula de debridação Tipo12 CMA  
215 12 03 09 Cânula de debridação Tipo12 INC  
215 12 03 10 Cânula de debridação Tipo12 RPC  
215 12 05 01 Cânula de debridação Tipo12 APC  
215 12 05 02 Cânula de debridação Tipo12 APCR  
215 12 05 03 Cânula de debridação Tipo12 BA  
215 12 05 04 Cânula de debridação Tipo12 BO  
215 12 05 05 Cânula de debridação Tipo12 BR  
215 12 05 07 Cânula de debridação Tipo12 CM  
215 12 05 08 Cânula de debridação Tipo12 CMA  
215 12 05 09 Cânula de debridação Tipo12 INC  
215 12 05 10 Cânula de debridação Tipo12 RPC  
215 12 06 01 Cânula de debridação Tipo12 APC  
215 12 06 02 Cânula de debridação Tipo12 APCR  
215 12 06 03 Cânula de debridação Tipo12 BA  
215 12 06 04 Cânula de debridação Tipo12 BO  
215 12 06 05 Cânula de debridação Tipo12 BR  
215 12 06 07 Cânula de debridação Tipo12 CM  
215 12 06 08 Cânula de debridação Tipo12 CMA  
215 12 06 09 Cânula de debridação Tipo12 INC  
215 12 06 10 Cânula de debridação Tipo12 RPC  
215 12 22 01 Cânula de debridação Tipo12 APC  
215 12 22 02 Cânula de debridação Tipo12 APCR  
215 12 22 03 Cânula de debridação Tipo12 BA  
215 12 22 04 Cânula de debridação Tipo12 BO  
215 12 22 05 Cânula de debridação Tipo12 BR  
215 12 22 07 Cânula de debridação Tipo12 CM  
215 12 22 08 Cânula de debridação Tipo12 CMA  
215 12 22 09 Cânula de debridação Tipo12 INC  
215 12 22 10 Cânula de debridação Tipo12 RPC  
215 12 24 01 Cânula de debridação Tipo12 APC  
215 12 24 02 Cânula de debridação Tipo12 APCR  
215 12 24 03 Cânula de debridação Tipo12 BA  
215 12 24 04 Cânula de debridação Tipo12 BO  
215 12 24 05 Cânula de debridação Tipo12 BR  
215 12 24 07 Cânula de debridação Tipo12 CM  
215 12 24 08 Cânula de debridação Tipo12 CMA  
215 12 24 09 Cânula de debridação Tipo12 INC  
215 12 24 10 Cânula de debridação Tipo12 RPC  
215 12 25 01 Cânula de debridação Tipo12 APC  
215 12 25 02 Cânula de debridação Tipo12 APCR  
215 12 25 03 Cânula de debridação Tipo12 BA  
215 12 25 04 Cânula de debridação Tipo12 BO

215 12 25 05 Cânula de debridação Tipo12 BR  
215 12 25 07 Cânula de debridação Tipo12 CM  
215 12 25 08 Cânula de debridação Tipo12 CMA  
215 12 25 09 Cânula de debridação Tipo12 INC  
215 12 25 10 Cânula de debridação Tipo12 RPC  
215 12 26 01 Cânula de debridação Tipo12 APC  
215 12 26 02 Cânula de debridação Tipo12 APCR  
215 12 26 03 Cânula de debridação Tipo12 BA  
215 12 26 04 Cânula de debridação Tipo12 BO  
215 12 26 05 Cânula de debridação Tipo12 BR  
215 12 26 07 Cânula de debridação Tipo12 CM  
215 12 26 08 Cânula de debridação Tipo12 CMA  
215 12 26 09 Cânula de debridação Tipo12 INC  
215 12 26 10 Cânula de debridação Tipo12 RPC  
215 12 27 01 Cânula de debridação Tipo12 APC  
215 12 27 02 Cânula de debridação Tipo12 APCR  
215 12 27 03 Cânula de debridação Tipo12 BA  
215 12 27 04 Cânula de debridação Tipo12 BO  
215 12 27 05 Cânula de debridação Tipo12 BR  
215 12 27 07 Cânula de debridação Tipo12 CM  
215 12 27 08 Cânula de debridação Tipo12 CMA  
215 12 27 09 Cânula de debridação Tipo12 INC  
215 12 27 10 Cânula de debridação Tipo12 RPC

ACRÉSCIMO DOS SEGUINTE MODELOS COMERCIAIS:

215 05 03 11 Cânula de debridação Tipo05 BD  
215 05 03 12 Cânula de debridação Tipo05 BRSP  
215 05 03 13 Cânula de debridação Tipo05 BASP  
215 05 03 14 Cânula de debridação Tipo05 BOSP  
215 05 06 11 Cânula de debridação Tipo05 BD  
215 05 06 12 Cânula de debridação Tipo05 BRSP  
215 05 06 13 Cânula de debridação Tipo05 BASP  
215 05 06 14 Cânula de debridação Tipo05 BOSP  
215 05 07 01 Cânula de debridação Tipo05 APC  
215 05 07 02 Cânula de debridação Tipo05 APCR  
215 05 07 03 Cânula de debridação Tipo05 BA  
215 05 07 04 Cânula de debridação Tipo05 BO  
215 05 07 05 Cânula de debridação Tipo05 BR  
215 05 07 07 Cânula de debridação Tipo05 CM  
215 05 07 08 Cânula de debridação Tipo05 CMA  
215 05 07 09 Cânula de debridação Tipo05 INC  
215 05 07 10 Cânula de debridação Tipo05 RPC  
215 05 08 01 Cânula de debridação Tipo05 APC  
215 05 08 02 Cânula de debridação Tipo05 APCR  
215 05 08 03 Cânula de debridação Tipo05 BA  
215 05 08 04 Cânula de debridação Tipo05 BO  
215 05 08 05 Cânula de debridação Tipo05 BR  
215 05 08 07 Cânula de debridação Tipo05 CM  
215 05 08 08 Cânula de debridação Tipo05 CMA  
215 05 08 09 Cânula de debridação Tipo05 INC  
215 05 08 10 Cânula de debridação Tipo05 RPC  
215 05 09 01 Cânula de debridação Tipo05 APC  
215 05 09 02 Cânula de debridação Tipo05 APCR  
215 05 09 03 Cânula de debridação Tipo05 BA  
215 05 09 04 Cânula de debridação Tipo05 BO  
215 05 09 05 Cânula de debridação Tipo05 BR

215 05 09 07 Cânula de debridação Tipo05 CM  
215 05 09 08 Cânula de debridação Tipo05 CMA  
215 05 09 09 Cânula de debridação Tipo05 INC  
215 05 09 10 Cânula de debridação Tipo05 RPC  
215 05 09 11 Cânula de debridação Tipo05 BD  
215 05 09 12 Cânula de debridação Tipo05 BRSP  
215 05 09 13 Cânula de debridação Tipo05 BASP  
215 05 09 14 Cânula de debridação Tipo05 BOSP  
215 05 10 01 Cânula de debridação Tipo05 APC  
215 05 10 02 Cânula de debridação Tipo05 APCR  
215 05 10 03 Cânula de debridação Tipo05 BA  
215 05 10 04 Cânula de debridação Tipo05 BO  
215 05 10 05 Cânula de debridação Tipo05 BR  
215 05 10 07 Cânula de debridação Tipo05 CM  
215 05 10 08 Cânula de debridação Tipo05 CMA  
215 05 10 09 Cânula de debridação Tipo05 INC  
215 05 10 10 Cânula de debridação Tipo05 RPC  
215 05 10 11 Cânula de debridação Tipo05 BD  
215 05 10 12 Cânula de debridação Tipo05 BRSP  
215 05 10 13 Cânula de debridação Tipo05 BASP  
215 05 10 14 Cânula de debridação Tipo05 BOSP  
215 06 03 11 Cânula de debridação Tipo06 BD  
215 06 03 12 Cânula de debridação Tipo06 BRSP  
215 06 03 13 Cânula de debridação Tipo06 BASP  
215 06 03 14 Cânula de debridação Tipo06 BOSP  
215 06 06 11 Cânula de debridação Tipo06 BD  
215 06 06 12 Cânula de debridação Tipo06 BRSP  
215 06 06 13 Cânula de debridação Tipo06 BASP  
215 06 06 14 Cânula de debridação Tipo06 BOSP  
215 06 07 01 Cânula de debridação Tipo06 APC  
215 06 07 02 Cânula de debridação Tipo06 APCR  
215 06 07 03 Cânula de debridação Tipo06 BA  
215 06 07 04 Cânula de debridação Tipo06 BO  
215 06 07 05 Cânula de debridação Tipo06 BR  
215 06 07 07 Cânula de debridação Tipo06 CM  
215 06 07 08 Cânula de debridação Tipo06 CMA  
215 06 07 09 Cânula de debridação Tipo06 INC  
215 06 07 10 Cânula de debridação Tipo06 RPC  
215 06 08 01 Cânula de debridação Tipo06 APC  
215 06 08 02 Cânula de debridação Tipo06 APCR  
215 06 08 03 Cânula de debridação Tipo06 BA  
215 06 08 04 Cânula de debridação Tipo06 BO  
215 06 08 05 Cânula de debridação Tipo06 BR  
215 06 08 07 Cânula de debridação Tipo06 CM  
215 06 08 08 Cânula de debridação Tipo06 CMA  
215 06 08 09 Cânula de debridação Tipo06 INC  
215 06 08 10 Cânula de debridação Tipo06 RPC  
215 06 09 01 Cânula de debridação Tipo06 APC  
215 06 09 02 Cânula de debridação Tipo06 APCR  
215 06 09 03 Cânula de debridação Tipo06 BA  
215 06 09 04 Cânula de debridação Tipo06 BO  
215 06 09 05 Cânula de debridação Tipo06 BR  
215 06 09 07 Cânula de debridação Tipo06 CM  
215 06 09 08 Cânula de debridação Tipo06 CMA  
215 06 09 09 Cânula de debridação Tipo06 INC  
215 06 09 10 Cânula de debridação Tipo06 RPC

215 06 09 11 Cânula de debridação Tipo06 BD  
215 06 09 12 Cânula de debridação Tipo06 BRSP  
215 06 09 13 Cânula de debridação Tipo06 BASP  
215 06 09 14 Cânula de debridação Tipo06 BOSP  
215 06 10 01 Cânula de debridação Tipo06 APC  
215 06 10 02 Cânula de debridação Tipo06 APCR  
215 06 10 03 Cânula de debridação Tipo06 BA  
215 06 10 04 Cânula de debridação Tipo06 BO  
215 06 10 05 Cânula de debridação Tipo06 BR  
215 06 10 07 Cânula de debridação Tipo06 CM  
215 06 10 08 Cânula de debridação Tipo06 CMA  
215 06 10 09 Cânula de debridação Tipo06 INC  
215 06 10 10 Cânula de debridação Tipo06 RPC  
215 06 10 11 Cânula de debridação Tipo06 BD  
215 06 10 12 Cânula de debridação Tipo06 BRSP  
215 06 10 13 Cânula de debridação Tipo06 BASP  
215 06 10 14 Cânula de debridação Tipo06 BOSP  
215 07 03 11 Cânula de debridação Tipo07 BD  
215 07 03 12 Cânula de debridação Tipo07 BRSP  
215 07 03 13 Cânula de debridação Tipo07 BASP  
215 07 03 14 Cânula de debridação Tipo07 BOSP  
215 07 06 11 Cânula de debridação Tipo07 BD  
215 07 06 12 Cânula de debridação Tipo07 BRSP  
215 07 06 13 Cânula de debridação Tipo07 BASP  
215 07 06 14 Cânula de debridação Tipo07 BOSP  
215 07 07 01 Cânula de debridação Tipo07 APC  
215 07 07 02 Cânula de debridação Tipo07 APCR  
215 07 07 03 Cânula de debridação Tipo07 BA  
215 07 07 04 Cânula de debridação Tipo07 BO  
215 07 07 05 Cânula de debridação Tipo07 BR  
215 07 07 07 Cânula de debridação Tipo07 CM  
215 07 07 08 Cânula de debridação Tipo07 CMA  
215 07 07 09 Cânula de debridação Tipo07 INC  
215 07 07 10 Cânula de debridação Tipo07 RPC  
215 07 08 01 Cânula de debridação Tipo07 APC  
215 07 08 02 Cânula de debridação Tipo07 APCR  
215 07 08 03 Cânula de debridação Tipo07 BA  
215 07 08 04 Cânula de debridação Tipo07 BO  
215 07 08 05 Cânula de debridação Tipo07 BR  
215 07 08 07 Cânula de debridação Tipo07 CM  
215 07 08 08 Cânula de debridação Tipo07 CMA  
215 07 08 09 Cânula de debridação Tipo07 INC  
215 07 08 10 Cânula de debridação Tipo07 RPC  
215 07 09 01 Cânula de debridação Tipo07 APC  
215 07 09 02 Cânula de debridação Tipo07 APCR  
215 07 09 03 Cânula de debridação Tipo07 BA  
215 07 09 04 Cânula de debridação Tipo07 BO  
215 07 09 05 Cânula de debridação Tipo07 BR  
215 07 09 07 Cânula de debridação Tipo07 CM  
215 07 09 08 Cânula de debridação Tipo07 CMA  
215 07 09 09 Cânula de debridação Tipo07 INC  
215 07 09 10 Cânula de debridação Tipo07 RPC  
215 07 09 11 Cânula de debridação Tipo07 BD  
215 07 09 12 Cânula de debridação Tipo07 BRSP  
215 07 09 13 Cânula de debridação Tipo07 BASP  
215 07 09 14 Cânula de debridação Tipo07 BOSP

215 07 10 01 Cânula de debridação Tipo07 APC  
215 07 10 02 Cânula de debridação Tipo07 APCR  
215 07 10 03 Cânula de debridação Tipo07 BA  
215 07 10 04 Cânula de debridação Tipo07 BO  
215 07 10 05 Cânula de debridação Tipo07 BR  
215 07 10 07 Cânula de debridação Tipo07 CM  
215 07 10 08 Cânula de debridação Tipo07 CMA  
215 07 10 09 Cânula de debridação Tipo07 INC  
215 07 10 10 Cânula de debridação Tipo07 RPC  
215 07 10 11 Cânula de debridação Tipo07 BD  
215 07 10 12 Cânula de debridação Tipo07 BRSP  
215 07 10 13 Cânula de debridação Tipo07 BASP  
215 07 10 14 Cânula de debridação Tipo07 BOSP  
215 09 03 11 Cânula de debridação Tipo09 BD  
215 09 03 12 Cânula de debridação Tipo09 BRSP  
215 09 03 13 Cânula de debridação Tipo09 BASP  
215 09 03 14 Cânula de debridação Tipo09 BOSP  
215 09 06 11 Cânula de debridação Tipo09 BD  
215 09 06 12 Cânula de debridação Tipo09 BRSP  
215 09 06 13 Cânula de debridação Tipo09 BASP  
215 09 06 14 Cânula de debridação Tipo09 BOSP  
215 09 07 01 Cânula de debridação Tipo09 APC  
215 09 07 02 Cânula de debridação Tipo09 APCR  
215 09 07 03 Cânula de debridação Tipo09 BA  
215 09 07 04 Cânula de debridação Tipo09 BO  
215 09 07 05 Cânula de debridação Tipo09 BR  
215 09 07 07 Cânula de debridação Tipo09 CM  
215 09 07 08 Cânula de debridação Tipo09 CMA  
215 09 07 09 Cânula de debridação Tipo09 INC  
215 09 07 10 Cânula de debridação Tipo09 RPC  
215 09 08 01 Cânula de debridação Tipo09 APC  
215 09 08 02 Cânula de debridação Tipo09 APCR  
215 09 08 03 Cânula de debridação Tipo09 BA  
215 09 08 04 Cânula de debridação Tipo09 BO  
215 09 08 05 Cânula de debridação Tipo09 BR  
215 09 08 07 Cânula de debridação Tipo09 CM  
215 09 08 08 Cânula de debridação Tipo09 CMA  
215 09 08 09 Cânula de debridação Tipo09 INC  
215 09 08 10 Cânula de debridação Tipo09 RPC  
215 09 09 01 Cânula de debridação Tipo09 APC  
215 09 09 02 Cânula de debridação Tipo09 APCR  
215 09 09 03 Cânula de debridação Tipo09 BA  
215 09 09 04 Cânula de debridação Tipo09 BO  
215 09 09 05 Cânula de debridação Tipo09 BR  
215 09 09 07 Cânula de debridação Tipo09 CM  
215 09 09 08 Cânula de debridação Tipo09 CMA  
215 09 09 09 Cânula de debridação Tipo09 INC  
215 09 09 10 Cânula de debridação Tipo09 RPC  
215 09 09 11 Cânula de debridação Tipo09 BD  
215 09 09 12 Cânula de debridação Tipo09 BRSP  
215 09 09 13 Cânula de debridação Tipo09 BASP  
215 09 09 14 Cânula de debridação Tipo09 BOSP  
215 09 10 01 Cânula de debridação Tipo09 APC  
215 09 10 02 Cânula de debridação Tipo09 APCR  
215 09 10 03 Cânula de debridação Tipo09 BA  
215 09 10 04 Cânula de debridação Tipo09 BO

215 09 10 05 Cânula de debridação Tipo09 BR  
215 09 10 07 Cânula de debridação Tipo09 CM  
215 09 10 08 Cânula de debridação Tipo09 CMA  
215 09 10 09 Cânula de debridação Tipo09 INC  
215 09 10 10 Cânula de debridação Tipo09 RPC  
215 09 10 11 Cânula de debridação Tipo09 BD  
215 09 10 12 Cânula de debridação Tipo09 BRSP  
215 09 10 13 Cânula de debridação Tipo09 BASP  
215 09 10 14 Cânula de debridação Tipo09 BOSP  
215 12 03 11 Cânula de debridação Tipo12 BD  
215 12 03 12 Cânula de debridação Tipo12 BRSP  
215 12 03 13 Cânula de debridação Tipo12 BASP  
215 12 03 14 Cânula de debridação Tipo12 BOSP  
215 12 06 11 Cânula de debridação Tipo12 BD  
215 12 06 12 Cânula de debridação Tipo12 BRSP  
215 12 06 13 Cânula de debridação Tipo12 BASP  
215 12 06 14 Cânula de debridação Tipo12 BOSP  
215 12 07 01 Cânula de debridação Tipo12 APC  
215 12 07 02 Cânula de debridação Tipo12 APCR  
215 12 07 03 Cânula de debridação Tipo12 BA  
215 12 07 04 Cânula de debridação Tipo12 BO  
215 12 07 05 Cânula de debridação Tipo12 BR  
215 12 07 07 Cânula de debridação Tipo12 CM  
215 12 07 08 Cânula de debridação Tipo12 CMA  
215 12 07 09 Cânula de debridação Tipo12 INC  
215 12 07 10 Cânula de debridação Tipo12 RPC  
215 12 08 01 Cânula de debridação Tipo12 APC  
215 12 08 02 Cânula de debridação Tipo12 APCR  
215 12 08 03 Cânula de debridação Tipo12 BA  
215 12 08 04 Cânula de debridação Tipo12 BO  
215 12 08 05 Cânula de debridação Tipo12 BR  
215 12 08 07 Cânula de debridação Tipo12 CM  
215 12 08 08 Cânula de debridação Tipo12 CMA  
215 12 08 09 Cânula de debridação Tipo12 INC  
215 12 08 10 Cânula de debridação Tipo12 RPC  
215 12 09 01 Cânula de debridação Tipo12 APC  
215 12 09 02 Cânula de debridação Tipo12 APCR  
215 12 09 03 Cânula de debridação Tipo12 BA  
215 12 09 04 Cânula de debridação Tipo12 BO  
215 12 09 05 Cânula de debridação Tipo12 BR  
215 12 09 07 Cânula de debridação Tipo12 CM  
215 12 09 08 Cânula de debridação Tipo12 CMA  
215 12 09 09 Cânula de debridação Tipo12 INC  
215 12 09 10 Cânula de debridação Tipo12 RPC  
215 12 09 11 Cânula de debridação Tipo12 BD  
215 12 09 12 Cânula de debridação Tipo12 BRSP  
215 12 09 13 Cânula de debridação Tipo12 BASP  
215 12 09 14 Cânula de debridação Tipo12 BOSP  
215 12 10 01 Cânula de debridação Tipo12 APC  
215 12 10 02 Cânula de debridação Tipo12 APCR  
215 12 10 03 Cânula de debridação Tipo12 BA  
215 12 10 04 Cânula de debridação Tipo12 BO  
215 12 10 05 Cânula de debridação Tipo12 BR  
215 12 10 07 Cânula de debridação Tipo12 CM  
215 12 10 08 Cânula de debridação Tipo12 CMA  
215 12 10 09 Cânula de debridação Tipo12 INC



215 12 10 10 C nula de debrida o Tipo12 RPC  
215 12 10 11 C nula de debrida o Tipo12 BD  
215 12 10 12 C nula de debrida o Tipo12 BRSP  
215 12 10 13 C nula de debrida o Tipo12 BASP  
215 12 10 14 C nula de debrida o Tipo12 BOSP

### 3. Indica o de Uso/ Finalidade

A C nula de Debrida o TP possui a fun o de realizar debrida o em tecidos moles e raspagem, perfura o em tecidos  sseos em procedimentos cir rgicos de ortopedia e coluna. Esse produto   destinado para cirurgi es que estejam familiarizados com a t cnica.

### 4. Princ pio de Funcionamento

O princ pio de funcionamento da C nula de Debrida o TP   a perfura o, raspagem, moagem e retirada de tecido  sseo e cartilaginoso. A parte interna realiza o corte e a suc o dos tecidos simultaneamente.

### 5. Modo de Uso do Produto

- Verifique se a embalagem n o est  danificada;
- Verifique se a indica o de esteriliza o est  correta;
- Verifique o prazo de validade da esteriliza o;
- Abra a caixa e retire a embalagem prim ria;
- Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos est reis, abra a embalagem prim ria e retire o produto;
- Conecte a C nula de Debrida o TP   pe a de m o e esta ao Shaver que deve estar conectado   rede el trica correspondente;
- Ligue o Shaver;
- Realize o procedimento cir rgico aplic vel;
- Ap s o procedimento, desligue o Shaver, desconecte a C nula de Debrida o TP, inutilize-a e descarte-a em lixo hospitalar.

### 6. Composi o

As C nulas de Debrida o TP t m componentes manufacturados nos seguintes materiais:

**Parte ativa:** A o inoxid vel 304 e A o inoxid vel 455 de acordo com as especifica es da norma ASTM F899.

**Engate:** policarbonato de acordo com as especifica es da norma ASTM F997 e politetrafluoretileno de acordo com as especifica es da norma ASTM D3294.

## **7. Esterilização**

As Cânulas de Debridação TP são fornecidas na condição ESTÉRIL, sendo o método de esterilização por Radiação Gama, conforme norma ABNT NBR ISO 11137 ou Peróxido de Hidrogênio, conforme norma NBR ISO 14937 ou Óxido de Etileno (ETO), conforme norma ABNT NBR ISO 11135.

Prazo de validade: 2 anos

## **8. Condições de Armazenamento**

- As Cânulas de Debridação TP, antes da utilização, devem ser armazenadas de forma a manter a integridade da embalagem. Recomenda-se que as Cânulas de Debridação TP sejam armazenadas separadamente de instrumentais. Armazenar em estantes de armação metálica ou vidro, com altura mínima do piso, possibilitando assim a limpeza e higiene diária;
- As Cânulas de Debridação TP devem ser armazenados em local seco (umidade até 70%) e convém que não sejam expostos diretamente à luz do sol, radiação ionizante, extremos de temperatura (até 40°C), ou contaminação particulada;
- Garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto estocado;
- Recomenda-se a utilização do princípio “primeiro que entra, primeiro que sai”. Convém que seja adotada a prática de rotação de estoque para todas as Cânulas de Debridação TP, em todas as áreas de estocagem.

## **9. Condições de Transporte**

- É necessário que não seja colocado nenhum objeto pesado ou pontiagudo adjacente ao produto para não danificar a embalagem e evitar a contaminação conseqüente disso;
- As Cânulas de Debridação TP devem ser transportadas de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento da Cânula de Debridação TP e de sua embalagem.

## **10. Condições de Manipulação**

- O produto se encontrará estéril enquanto estiver dentro do prazo de validade e a embalagem não for aberta ou danificada;
- Cânula de Debridação TP possui número de lote e o sistema de vendas integrado ao sistema de qualidade possibilita o seu rastreamento e o destino final caso seja necessário.

## 11. Advertências

- Proibido Reprocessar;
- Este produto somente pode ser utilizado sob prescrição médica ou sua supervisão;
- O fabricante deste produto não pratica a medicina e não recomenda esta ou qualquer outra técnica cirúrgica para uso em um determinado paciente. O cirurgião que executa qualquer procedimento cirúrgico é responsável pela determinação e utilização de técnicas apropriadas para cada tipo de paciente;
- Teste primeiramente a Cânula de Debridação TP fora do paciente, nos modos e velocidades de trabalho;
- Não utilize a Cânula de Debridação TP que pareça danificada ou com vibração excessiva;
- Não utilize força excessiva, pois pode resultar em quebra ou fratura da Cânula de Debridação TP;
- Cânula de Debridação TP com vibração excessiva podem aquecer e/ou causar aquecimento na peça de mão;
- Não aplique ou exerça força de alavanca nas Cânula de Debridação TP;
- Não toque a área de movimento da Cânula de Debridação TP com outros instrumentos. Se isso ocorrer, poderá resultar em quebra, fratura ou dano da Cânula de Debridação TP ou do equipamento;
- Não utilize o produto fora da data de validade e sempre verifique se a indicação de esterilização está correta;
- O produto só deve ser utilizado por profissionais médicos qualificados, que possuam o conhecimento e a experiência necessários para a devida utilização do produto, conhecimento de manuseio de produtos estéreis;
- O produto não deve ser reutilizado e/ou re-esterilizado, e por possuir diâmetro interno menor que 3mm o reprocessamento é proibido, conforme disposto na Resolução - RE nº 2605, de 11 de agosto de 2006, devendo ser descartado em lixo hospitalar;
- O produto deve ser transportado e acondicionado sempre protegido contra todo tipo de umidade, sujeira e contato com substâncias inflamáveis, corrosivas, tóxicas ou explosivas;
- A embalagem não deve estar furada ou rasgada, deve ficar longe de instrumentos cortantes ou pontiagudos;
- Não guarde ou armazene este produto próximo a produtos de categorias diferentes;
- Cuidados especiais;
- Somente profissionais habilitados e com conhecimento dos procedimentos necessários para escolha da aplicação e utilização adequadas do produto deverão fazer uso do mesmo;
- O uso do produto com procedimentos e condições não adequadas poderá prejudicar o paciente, conduzindo a resultados não satisfatórios;
- O médico deverá checar a integridade e o prazo de validade da embalagem.

## 12. Precauções

- As Cânulas de Debridação TP, de uso único, são embaladas em embalagens não reutilizáveis, de forma que estão estéreis no momento de sua comercialização e que mantêm esta qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora que garante a esterilidade seja violada ou aberta. Somente use se a Cânula de Debridação TP estiver em embalagem íntegra e dentro do prazo de validade;
- O produto é apresentado esterilizado, portanto a embalagem deve ser somente aberta pelo circulante de sala e apresentada ao cirurgião. A integridade física da embalagem deve ser mantida até o momento da abertura pelo circulante de sala;
- Qualquer embalagem que tenha suas características superficiais alteradas, que tenha caído ou sido mal manuseado ou que seja suspeito de ter sofrido dano não deve ser utilizada e deve retornar ao fornecedor. Entretanto, o julgamento final quanto à adequabilidade da Cânula de Debridação TP é sempre do cirurgião que a utiliza;
- Descarte e não use a Cânula de Debridação TP fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, o que acarretará perda da esterilidade;
- Recomenda-se que a Cânula de Debridação TP seja descartada no lixo hospitalar (conforme as normas da autoridade sanitária local);
- Para a Cânula de Debridação TP que forem removidas da embalagem e inseridas dentro do ambiente cirúrgico, mesmo que não tenham sido utilizadas ou que tenham sido contaminadas por outras fontes, a reesterilização para uso não garante o desempenho atribuído ao produto, sendo de inteira responsabilidade do usuário. A Cânula de Debridação TP deve ser descartada no lixo hospitalar conforme as normas da autoridade sanitária local;
- O descarte deve ser realizado seguindo-se as disposições da Resolução RDC nº 222/2018 que dispõe sobre os requisitos de Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde, bem como outras práticas de biossegurança equivalentes.

## 13. Contraindicações

Não se aplica.

## 14. Efeitos Adversos

Não se aplica.

## 15. Reclamação

Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Setormed. Envie o produto limpo e embalado em saco plástico, número de lote do(s) componente(s) devidamente identificado com a descrição da não conformidade para Rua Arthur Rodrigues de Castros, 150 – Jardim São Paulo – CEP: 13570-410 – São Carlos – SP.

A Setormed disponibiliza um canal de comunicação através do telefone (16) 3416-5398 para notificações referentes ao produto.

**Fabricado por:** Setormed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos e Odontológicos S.A  
**CNPJ:** 13.533.397/0001-29

**Responsável Técnico:** Ricardo Luiz Vicentim – CREA-SP: 5062789745

Declaramos verdadeiras as informações descritas neste Modelo de Instrução de Uso.

---

**Responsável Técnico**  
Eng. Ricardo Luiz Vicentim  
**CREA-SP 5062789745**

---

**Responsável Legal**  
Ricardo de Queiroz